

2019年2月15日

お取引先各位

株式会社幸和製作所

弊社歩行車「テイコブリトルシリーズ」に関するお知らせとお願い

日頃より、弊社歩行車「テイコブリトルシリーズ」につきまして、格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

現在ご好評いただいておりますテイコブリトルシリーズの内、2014年以前に製造されたごく一部の製品におきまして、前輪フレームが破断する事象が発生しております。（対象製品は、別表①記載の通りです）

これら製品は、当社の品質基準であります強度や耐久性の試験に合格しており、耐久試験条件の範囲内での当該破損は発生いたしておりませんので、安心してご使用いただけます。但し、経年使用による製品寿命に達したものや前輪フレームへの想定外の外的応力が掛かることにより、発生する事象であります。今一度、取扱説明書の注意事項等をご覧の上、ご利用くださいますようお願い申し上げます。

また、モニタリング時、レンタルバック時など、当該製品の前輪フレームにあります溶接止端（※図参照）に、破損、ヒビなどの事象がないかご確認いただき、もし異常があれば、製品寿命と判断されるため直ちにご使用を中止するようお願いいたします。

（レンタルバック時に有効な確認方法は、別表②記載の通りです。）



今後ともお客様に安心安全な製品創りに取り組んで参りますので、ご理解とご協力を賜りますよう併せてお願いを申し上げます。

別表①

対象製品

品名	品番	製品イメージ
<p>テイコブリトル チェックブルー</p>	<p>HS05-CB 対象製造番号： ・CAJ,CAK,CAL,BHK,BHL、 BHM から始まる番号 ・CAM00001~02300 ・BHN00001~01326 ※2014年5月以降は対象外</p>	
<p>テイコブリトル ブラック</p>	<p>HS05-BK 対象製造番号： ・CAJ,CAK,CAL,CAM,BHK、 BHL から始まる番号 ・CAN00001~00200 ・BHM00001~00440</p>	
<p>テイコブリトル R</p>	<p>HS05R 対象製造番号 ・CAM00001~CAM02665</p>	
<p>テイコブリトルハイ</p>	<p>HS05H 対象製造番号 ・CAL、から始まる番号 ・CAM00001~CAM02500</p>	

別表②

溶接止端の破損・ヒビの目視による確認方法

フレーム色がシルバーの場合は目視でヒビが見えにくい場合があるので、その場合は以下のように着色すると見やすくなります。(ブラックの場合は着色不要です)

1. 市販のホワイトボード用マーカー（赤色など）を準備する。
2. 前脚溶接止端に全周ホワイトボード用マーカーを塗布する。
3. マーカー塗布後 約 10 秒間放置する。
4. 目視にて溶接ヒビの有無を確認する。
大きなヒビがあると、ヒビ部分の色が濃く見える。(写真2)。
細かいヒビの場合は、ヒビ部分の色が薄れる。(写真3)
5. ヒビがなければ、から拭き、または水拭きにてマーカーを拭き取る。
ヒビがある場合は、製品寿命にて使用を中止する。ヒビがある状態で使用継続すると溶接止端にヒビが拡大し、最終的に破断に至る。



写真1 (使用可能)
ヒビはない。全体的に色味には変化がない。



写真2 (使用中止)
溶接止端に大きなヒビがある(青矢印)。ヒビの部分の色が線状に濃くなっている。



写真3 (要問合せ)
溶接止端に細かいキズがある(青矢印)。

写真1：外観では色味に変化がないので、通常にご使用頂けます。

写真2：外観で止端部に線状の色が濃く隙間があるように見受けられるので使用を直ちに中止していただけますよう、お願い致します。

写真3：外観で細かいヒビが見受けられる場合には、表面上のキズである可能性がありますので、キズかヒビわからない場合、弊社までお問い合わせください。