



モレない、ズレない、ムレない うすくて柔らかい防水シートです

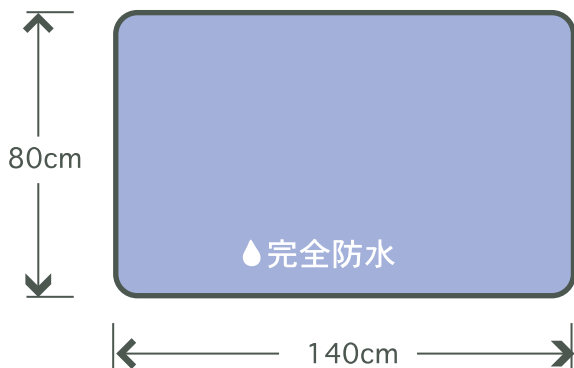

おしりの位置を基準に
マットレスに
巻き込んで
使用します

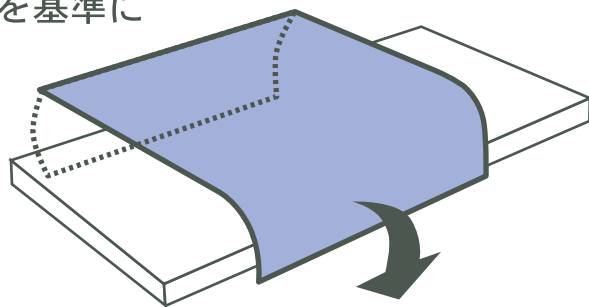

! 安全に関する注意事項

- 防水シートには表と裏があります。マットレス等に設置する際は、生地のを上にしてください。
- マットレス等に設置する際は、しわやたるみのないように表面を平らに伸ばしてください。
しわやたるみが床ずれの原因となります場合があります。
- 防水シートをマットレス等に設置する際は、シートの中央部分がおしりの位置にくるように巻き込んでご使用ください。
- 防水シートとマットレスの間に突起物が挟まっていないかご確認ください。
- 火気の近くでは使用しないでください。

お手入れ方法

- 洗濯機の通常モードで洗えます。
- すすぎ、乾燥は十分に行ってください。
すすぎ、乾燥が不十分だとモレの原因となります。
- 陰干ししてください。直射日光に当てると変色する場合があります。

洗濯	<input type="radio"/> 水温 40℃以下 ドライクリーニング × 柔軟剤・塩素系漂白剤の使用 ×
脱水	<input type="radio"/> 弱く (短く)
乾燥機	<input type="radio"/> 温度 60℃以下
アイロン	<input type="radio"/> 低温

品質表示

品番 / SE04-WT
表地 / ポリエステル 100%
裏地 / ポリウレタンフィルム
寸法 / 幅 140cm × 長さ 80cm
色 / ホワイト

