

4938765237484

本 持 重 力	体 手 量 一 サフラン	アルミ 天然木 260g サフラン
------------------	--------------------------	----------------------------

杖蹠申

六

大坂府堺市堺区海山町3丁159番地1
0982 会社幸和製作所

歩行でまわらなければ、介助者が歩行を含みます。)ハビリ中などのように、体重の一部を支えないといつ歩行できしない(医師などの指導によって。(医師などの指導によって。)での使用は含みません。

ご使用の前に
杖は、歩行できな方がより歩行できる方のみ使用するも
うな状態になつてください。


この度は、弊社製品をお買いあげいただきましてありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、読み終わったらお手に付けてお保管ください。

EN12
[EN12] 持ち手

持 手	天然木
寸 法(全長)	65.5~85.5cm
重 量	260 g


S SGマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

大きさの目安

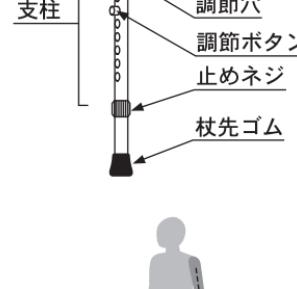


40度曲がる状態

- る際の日安で9。

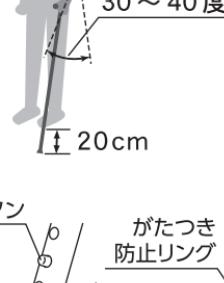

適度な長さに調節
止めネジを確実に

- 調節ボタンと止めねじが確
実に締め付けてあること

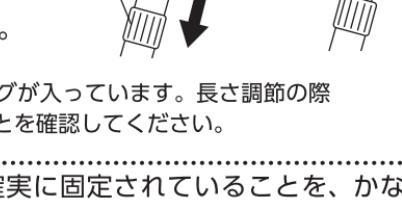

●指などをはさまないように注意してください。

屋り方


支柱の重心がかかる

中心に重心がかかる
握ってください。

と荷重がかかる
になるため太

ご使用後・保管方法

- ・使用後は、杖先ゴムの底に
- ・お子さまの手の届かない所

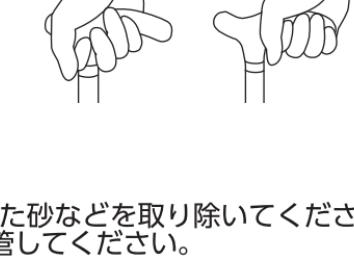

ご使用上の注意

- 本に合った杖を選んでください。(「ご使用の前に」参照)
前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣

- ・使用中も、支柱が確実に固定などを確認してください。

- 濡れたり凍つたりした路面は滑りやすいため、十分に注意してください。
 - この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。
 - 杖以外の用途（例えば登山・護身など）には使用しないでください。
 - 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合があるため、十分に注意してください。
 - 握り先端に過大な力をかけるような使い方をしないでください。
 - 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

株式会社 千和製作所

TEL:072-238-0459

す。あらかじめご了承くだ