

品名


テイコブポータブルトイレ
(肘掛け付)

品番

PT02

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。

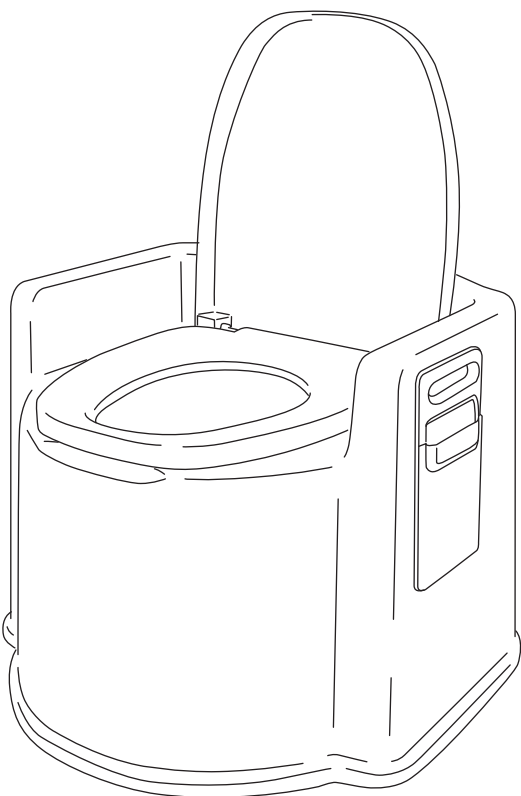

目次

ご使用前の注意	1P
ご使用上の注意	1P
お手入れ方法	1P
各部の名称と製品仕様	2P
ご使用方法	2P

福祉用具総合メーカー

 **株式会社 幸和製作所**

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート】10時～17時(土・日・祝日を除く)

 **0120-508-058**

フリーコール フリーコール コーワ オーコーワ

<http://www.tacaof.co.jp>

転倒や事故防止のため、下記の事項をかならず守ってください。

ご使用前の注意

⚠ 警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 安定の悪い場所に設置しないでください。
- 各部を点検し、確実に設置できていること、ぐらつきがないことを確認してください。

⚠ 注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光に当てないでください。

ご使用上の注意

⚠ 警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 使用者の身体状況などにより、ご購入販売店や専門家等に相談したり、介助者が付き添ってください。
- フタに寄りかかったり、つかまって立ち座りしないでください。
- フタの上に座らないでください。また踏み台として使用しないでください。
- 幼児、子供を遊ばせるなど、他の用途には使用しないでください。
- 最大使用者体重をかならず守ってください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外行わないでください。


⚠ 注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- バケツの中にタバコの火を落とさないでください。

お手入れ方法

- 柔らかい布やスポンジに、うすめた中性洗剤を含ませて汚れを拭き取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流してください。特に汚れがひどい場合は、トイレ用洗剤を使用してください。
- タワシや研磨剤入りのスポンジ、磨き粉などは使用しないでください。
- 塩素系洗剤、柑橘類成分を含む洗剤、シンナー、クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチックの変質や劣化、破損をまねくことがあります。
- 便座の抗菌加工は、汚れを防止するものではありません。かならず他の部分と同様に、こまめにお手入れをしてください。

各部の名称と製品仕様

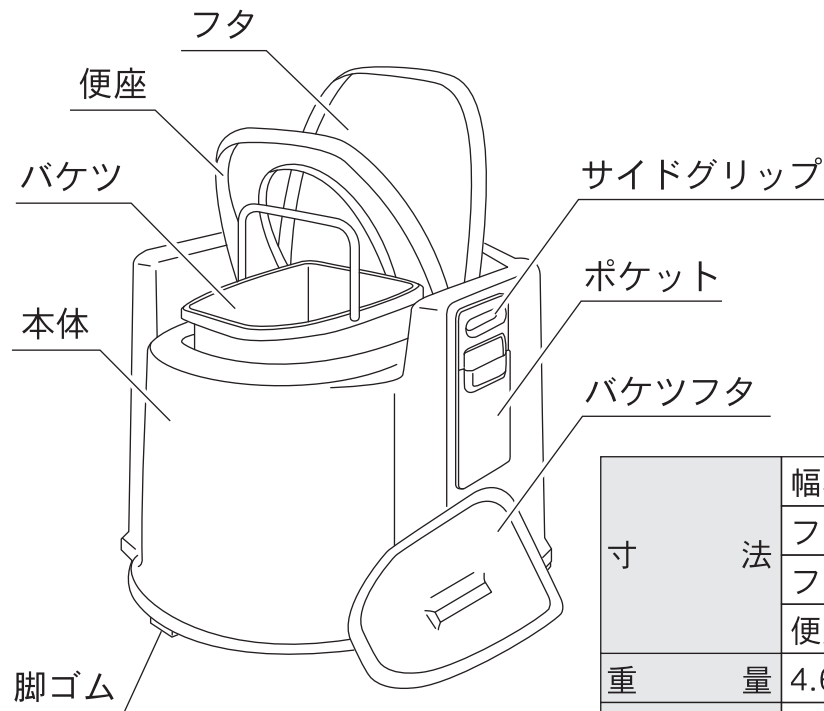

寸 法	幅590×奥行555mm
	フタを閉めた時の高さ 495mm
	フタを開けた時の高さ 765mm
	便座までの高さ 380mm
重 量	4.6kg
最大使用者体重	100kg
バケツ容量	10ℓ
材 質	本体・フタ・便座・バケツ バケツフタ・バケツ柄 : ポリプロピレン
	ポケット・サイドグリップ : ポリスチレン
	脚ゴム : エラストマー

ご使用方法

- ご使用前にはバケツに 1～2ℓ の水を入れてください。
- 汚物の処理はバケツを取りはずしてトイレに流してください。
- 汚物の処理はできるだけ早めに行ってください。
- ポケットにはトイレットペーパーを入れておくことができます。
- 便座には市販の便座カバー（O型）が使用できます。



ポータブル
トイレ

SGマークが表示されたポータブル トイレは安心してお使いいただけます。

SGマークが表示されたポータブルトイレは安心してお使いになれますが、万一、消費者の皆様が正常に使用していたときに、製品の欠陥による事故が発生し人身の損害を被った場合には『製品安全協会』がその損害を賠償いたします。

※但し、保証期間は購入後5年です。

■賠償についてのご注意

生産物賠償責任保険はご購入のポータブルトイレそのものが故障しても、その品質について保証するものではありません。

その製品の欠陥に基づいて発生した事故による人身の損害に対する対人賠償制度です。

■事故の連絡について

事故が発生した日から60日以内に下記にご連絡ください。

財団法人 製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪2階

TEL. 03-5808-3300(代表)

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品を他の方にお譲りになるときは、かならず本書もあわせてお渡してください。

TAKE CARE OF
Tacaof
<http://www.tacaof.co.jp>