

# ティコブ 差込便器

身体にフィットしやすい形

冷たさを感じにくい  
カバー付き

## 持ちやすい取っ手付

使用时でも洗浄時でも  
持ちやすい取っ手付き。

## フィットしやすい形状

差込がスムーズに行え、  
身体にフィットしやすい  
やさしい形。

## 軽くて 使いやすい

落としても割れにくい  
プラスチック製です。

## 冷たさを感じにくい

カバー付なので、身体に当たったとき  
に冷たさを感じにくくなっています。  
床ずれがある方にも安心です。

## ティコブ 差込便器

便意を訴えることができるがトイレ  
に行くまでにもたつく方、オムツを  
使用したくない方に適切なアイテム  
です。介護だけでなく、入院時にも  
お使いいただけます。

快適に使える  
ひと工夫



ポイント  
1

## 防水シートを敷きましょう

ご使用の際に、防水シート  
などを敷くとこぼれたときも  
安心です。



## 使用方法

●下半身を横向きにして便器を差込、体位を仰向けに戻して、尿が飛散ないようにティッシュペーパーなどを当ててご使用ください。

## 使用上の注意

- 火気には近づけないでください。溶解・変形する恐れがあります。
- 使用後はかならず洗浄してください。洗浄後はよく乾かしてください。乾燥が不十分だと、かびや雑菌の繁殖および異臭の原因になります。
- たわしまたは、みがき粉などでみがくと傷つくことがあります。

## 保管方法

- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や湿気をさけ、風通しの良い清潔な場所に保管してください。



品質表示	品番	UR03
	販売名	ティコブ差込便器
	原料樹脂	本体:ポリエチレン フタ:ポリプロピレン カバー:ナイロン・ポリエステル
	耐熱温度	本体:70℃ フタ:120℃

MADE IN JAPAN