



モレない、ズレない、ムレない デニム素材の丈夫な防水シートです

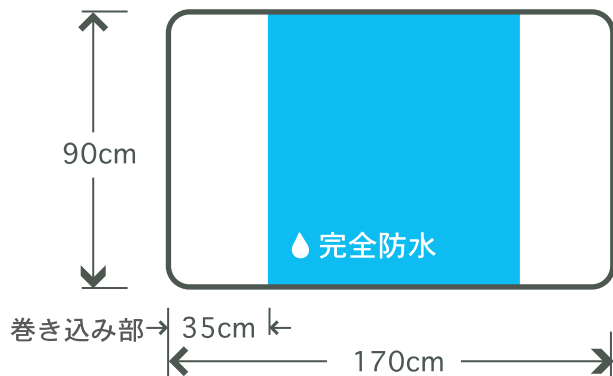

おしりの位置を基準に
マットレスに
巻き込んで
使用します

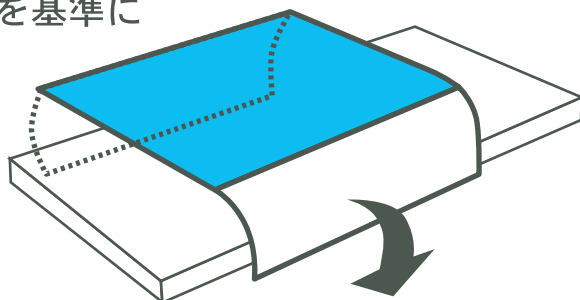

⚠️ 安全に関する注意事項

- 防水シートには表と裏があります。マットレス等に設置する際は、ブルーの面を上にご覧ください。
- マットレス等に設置する際は、しわやたるみのないよう表面を平らに伸ばしてください。しわやたるみが床ずれの原因となる場合があります。
- 防水シートをマットレス等に設置する際は、ブルーの部分がおしりの位置にくるように巻き込んでご使用ください。
- 防水シートとマットレスの間に突起物が挟まっていないかご確認ください。
- 火気の近くでは使用しないでください。

お手入れ方法

- 洗濯機の通常モードで洗えます。
- すすぎ、乾燥は十分に行ってください。すすぎ、乾燥が不十分だとモレの原因となります。
- 陰干ししてください。直射日光に当てると変色する場合があります。

洗濯	<input type="radio"/> 水温 40℃以下 <input type="radio"/> ドライクリーニング × 柔軟剤・塩素系漂白剤の使用 ×
脱水	<input type="radio"/> 弱く（短く）
乾燥機	<input type="radio"/> 温度 130℃以下
アイロン	<input type="radio"/> 温度 110℃以下

品質表示

品番 / SE06-BL
表地 / ポリエステル 65%、綿 35%
裏地 / 耐熱ポリウレタンフィルム
脇生地 / 綿 100%
寸法 / 幅 170cm × 長さ 90cm
色 / ブルー（脇生地ホワイト）



MADE IN JAPAN



株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459