

ティコブ 透明尿器

女性用
中身が確認できる透明タイプ

中身が
確認できる

本体が透明なので尿の状
態が確認できます。

軽くて
使いやすい

落としても割れにくい
プラスチック製です。

持ちやすい取っ手付き

使用時でも洗浄時でも持ち
やすい取っ手付き。

量が分かる目盛り付き

尿の量が一目で分かる
目盛り付き。
(100cc～800cc)



快適に使える
ひと工夫

ポイント
1

防水シーツを敷きましょう

ご使用する際に、防水シーツなどを敷くと
こぼれたときも安心です。



ポイント
2

お湯を通してましょう

ご使用前にお湯を通して、冷たさを
感じにくく快適にお使いいただけます。



使用方法

●衛生的にお使いいただくために下記の使用方法をお守りください。

- 1.容器のフタをとる。
- 2.受け口をご自身のほうに向くように持つ。
- 3.尿モレを防ぐために尿器本体を身体にできるだけ近づけて使用する。
- 4.使用後は尿を捨て、受け口と本体を共によく洗う。
- 5.洗った後は水をよく切り、フタをする。

使用上の注意

- 火のそばに置かないでください。
- たわしままたは、みがき粉などでみがくと傷がつくことがあります。
- 使用後の洗浄は水またはぬるま湯をご使用ください。



箱

外装:PP

保管方法

- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や湿気をさけ、風通しの良い清潔
な場所に保管してください。

MADE IN JAPAN



品番	UR02W
販売名	ティコブ透明尿器(女性用)
原料樹脂	本体:塩化ビニル フタ、口輪:ポリプロピレン
耐熱温度	本体:60°C フタ、口輪:120°C

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459