

ティコブ 半透明尿器

男性用

中身が見えにくい半透明タイプ

軽くて使いやすい

落としても割れにくい
プラスチック製です。

持ちやすい取っ手付き


使用時でも洗浄時でも持ち
やすい取っ手付き。

量分かる目盛り付き

尿の量が一目で分かる
目盛り付き。
(100cc~800cc)

中身が見えにくい

本体が半透明なので容器の中
身が見えにくくなっています。

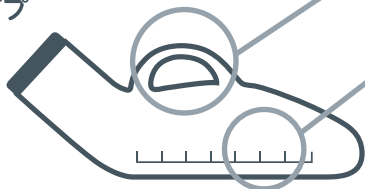

快適に使える
ひと工夫

ポイント
1

防水シートを敷きましょう

ご使用の際に、防水シートなどを敷くと
こぼれたときも安心です。



ポイント
2

お湯を通しましょう

ご使用前にお湯を通すと、冷たさを
感じにくく快適にお使いいただけます。



使用方法

●衛生的にお使いいただくために下記の使用方法をお守
りください。

1. 容器のフタをとる。
2. 受け口をご自身のほうに向くように持つ。
3. 尿モレを防ぐために尿器本体を身体にできるだけ近づ
けて使用する。
4. 使用後は尿を捨て、受け口と本体を共によく洗う。
5. 洗った後は水をよく切り、フタをする。

保管方法

- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光や湿気をさけ、風通しの良い清潔
な場所に保管してください。



使用上の注意

- 火のそばに置かないでください。
- たわしまたは、みがき粉などでみがく
と傷がつくことがあります。
- 使用後の洗浄は水またはぬるま湯を
ご使用ください。



外装:PP

品質表示	品番	UR01G
	販売名	ティコブ半透明尿器(男性用)
	原料樹脂	本体:ポリエチレン フタ、口輪:ポリプロピレン
	耐熱温度	本体:70℃ フタ、口輪:120℃

MADE IN JAPAN

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459