


取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。
また、読まれたあとは大切に保管して下さい。

各部の名称と製品仕様

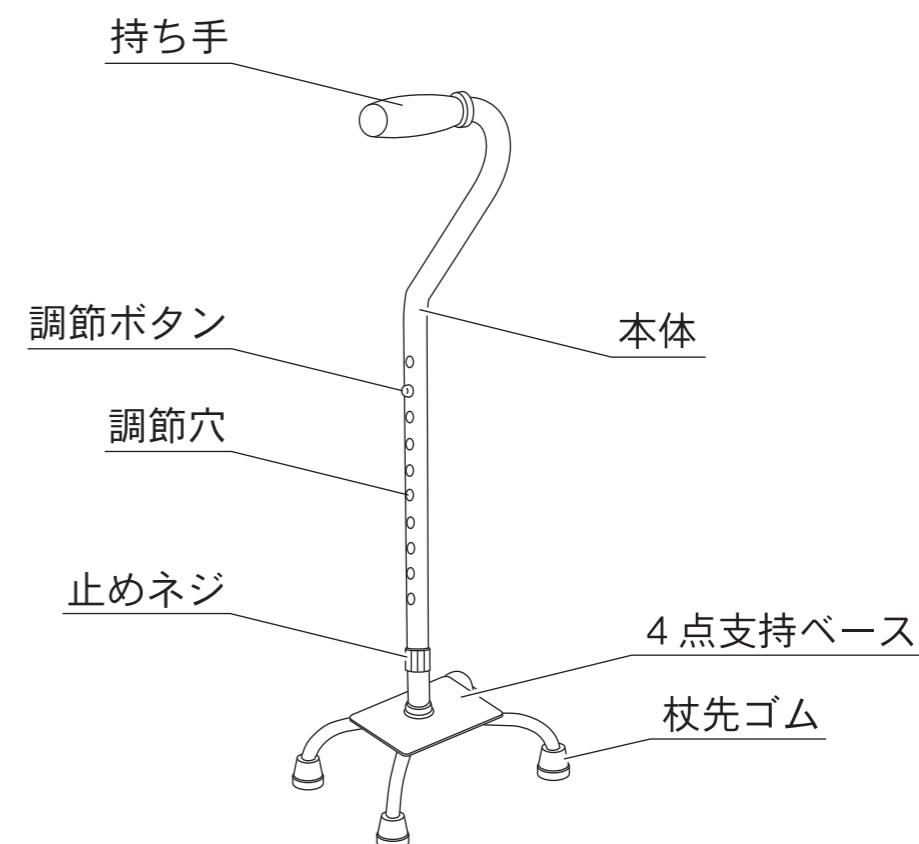

寸法	65.5 ~ 88cm (10ポジション)	本体材質	アルミ
重量	590 g	4点支持ベース材質	アルミ
脚部(接地部)	22.5 × 16cm	持ち手材質	TPR

製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、
ご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡下さい。

ご使用前の注意

警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目を必ず守って下さい。

- この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。
- 杖以外の用途（例えば登山・護身など）には使用しないで下さい。
- 使用前に各部を点検して下さい。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化して外れやすくなったりした場合は早めに交換して下さい。

注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守って下さい。

- 使用者の身体に合った高さに調節してから使用して下さい。
- 使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めネジに緩みがないことなどを確認して下さい。
- 濡れたり凍ったりして滑りやすくなっている路面や傾斜している場所では、十分に注意して下さい。
- 床の材質、表面加工などによっては、杖先ゴムが床に付着、色移り、変色する場合がありますため、注意して下さい。
- 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合がありますため、十分に注意して下さい。
- 4点支持ベースを踏んでしまうと、転倒しケガをする恐れがあるため、十分に注意して下さい。
- 握り先端に過大な力をかけるような使い方をしないで下さい。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないで下さい。

ご使用後 及び 保管方法


- 使用後は、杖先ゴムについた砂などを取り除いて下さい。
- 長期間、同じ場所に保管しないでください。床の材質、表面加工などによっては、杖先ゴムが床に付着、色移り、変色する場合があります。長期間、保管する場合は、直接床に置かないようにしてください。
- お子様の手の届かない所に保管して下さい。

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、ご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡下さい。そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡し下さい。

ご使用方法


■長さの調節方法

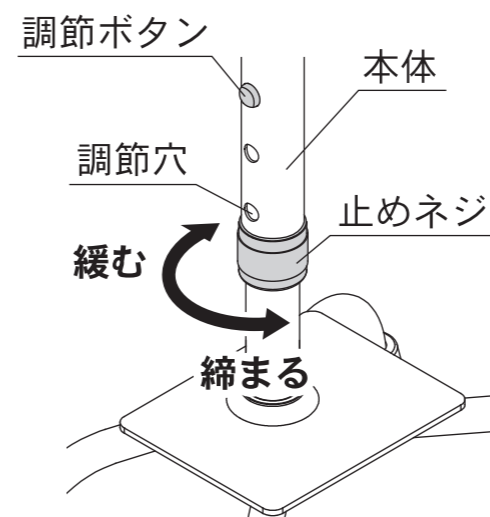

- 1 止めネジを緩めて下さい。
(時計回りの方向へ回すと緩みます。)
- 2 調節ボタンを押しながら本体を上下させ、適度な長さに調節して下さい。
持ち手が、腰骨の位置にくるぐらいが適度な長さの目安です。
- 3 止めネジを確実に締めて下さい。
(反時計回りの方向へ回すと締まります。)

注意 ● 調節ボタンと止めネジが確実に固定されているか、必ず確認して下さい。
● 指などをはさまないように注意して下さい。

■4点支持ベースの向きの変え方(右手仕様・左手仕様)

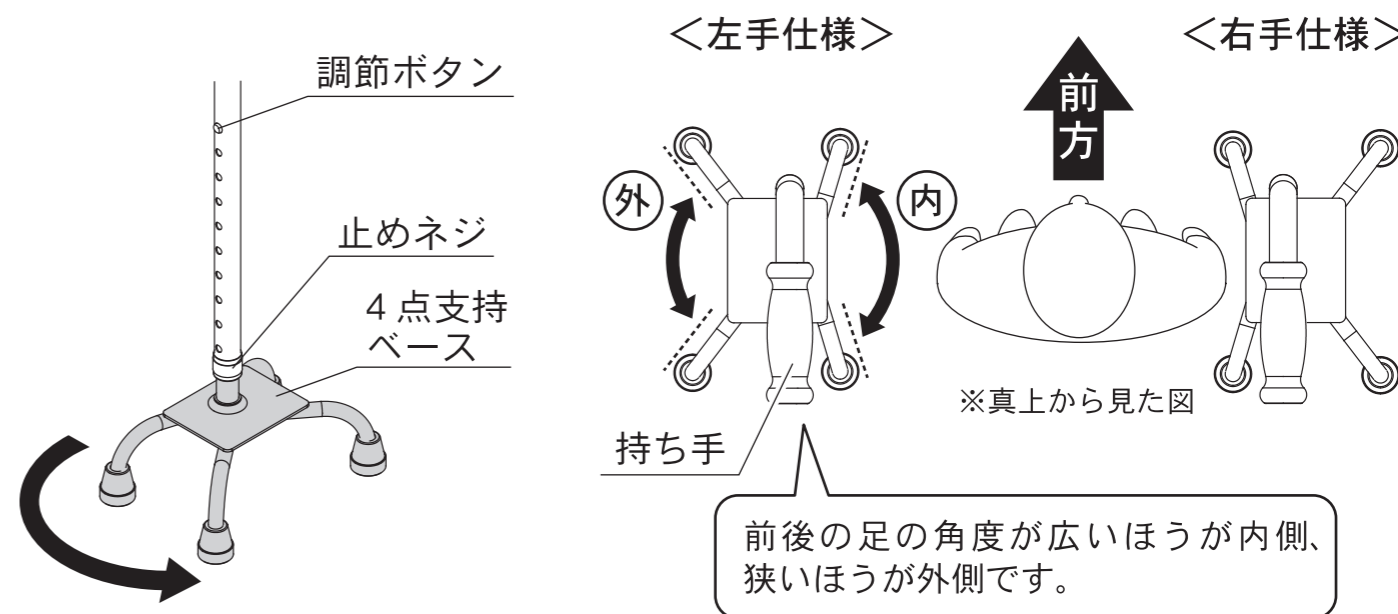

止めネジを緩め、調節ボタンを指で押さえながら、4点支持ベースを180度回転させて下さい。調節ボタンが調節穴から出たことを確認してから、止めネジを確実に締めて下さい。(※出荷時は右手仕様になっております。)

注意 ● 杖が、持ち手に対して正しい仕様になっていることを必ず確認して下さい。