

4  
938765004666

EN13	
本体	アルミ
持ち手	天然木
寸法(全長)	71~91cm
重量	250 g
カラーラー	ブラウン

全長サイズ  
71~91cm

# 伸縮杖

ご使用の前に

棒状杖では、杖なしで歩行する方がより歩行の効率が高まります。立歩行では、杖なしで歩行する方がより歩行の効率が高まります。(体重をかけすぎると、杖の使用には適しません。)また、杖の使用により、杖を痛めたり、杖を握りこむことで肩や腕に負担がかかることがあります。購入後は、必ずお手入れください。

- ①杖なしでは歩行でつかまらない方。(手すり歩行でつかまらない方や、介助者がいる方の使用を含みます。)
- ②ハビタリ中などに、体重の一部を支えないと歩行ではお違ひません。(医師などでの使用は含みません。)

株式会社幸和製作所  
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1  
TEL:072-238-0459  
袋


## ティコブ伸縮ステッキ(首細) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきましてありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、読み終わったあとは大切に保管してください。

### EN13


本体	アルミ
持ち手	天然木
寸法(全長)	71~91cm
重量	250 g

SGマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

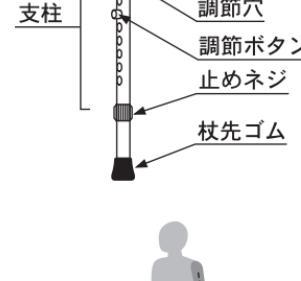


### ●杖長さの目安

- 杖先を足先の前方外側 20cm の場所に置いたとき、肘が 30~40 度曲がる状態が杖長さを決め際の目安です。

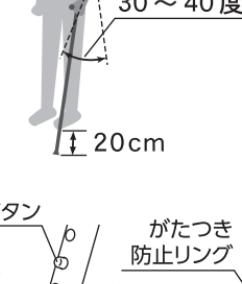

### ●長さの調節方法

- 止めねじをゆるめてください。
- 調節ボタンを押しながら、適度な長さに調節してください。
- 止めねじを確実に締めてください。

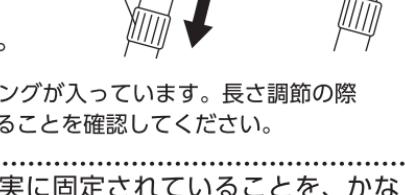


※止めねじの内側には、がたつき防止リングが入っています。長さ調節の際はリングがかからず上右図の位置にあることを確認してください。

- 調節ボタンと止めねじが確実に固定されていることを、かならず確認してください。  
●指などをはさまないように注意してください。

### ●杖の握り方

支柱の中心に重心がかかるように握ってください。持ち手の一部分だけを握ると荷重がかたより、不安定になるため大変危険です。

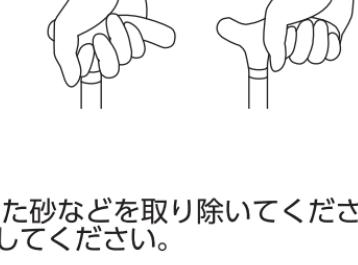

### ●ご使用後・保管方法

- 使用後は、杖先ゴムの底についた砂などを取り除いてください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

### ⚠ ご使用上の注意

- 身体に合った杖を選んでください。(「ご使用の前に」参照)
- 使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化してはすぐれやすくなったりした場合は早めに交換してください。
- 使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めねじにゆるみがないことなどを確認してください。
- 濡れたり凍ったりした路面は滑りやすいため、十分に注意してください。
- この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。
- 杖以外の用途(例えば登山・護身など)には使用しないでください。
- 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合があるため、十分に注意してください。
- 握り先端に過大な力をかけるような使い方をしないでください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

# 株式会社幸和製作所

〒590-0982  
大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1  
TEL:072-238-0459

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 MADE IN TAIWAN