


品名

テイコブ折りたたみ
シャワーチェア

品番

BSOC03
取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読み
ください。また、読まれたあとは大切に保管してください。
製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは
弊社カスタマーサポートへご連絡ください。

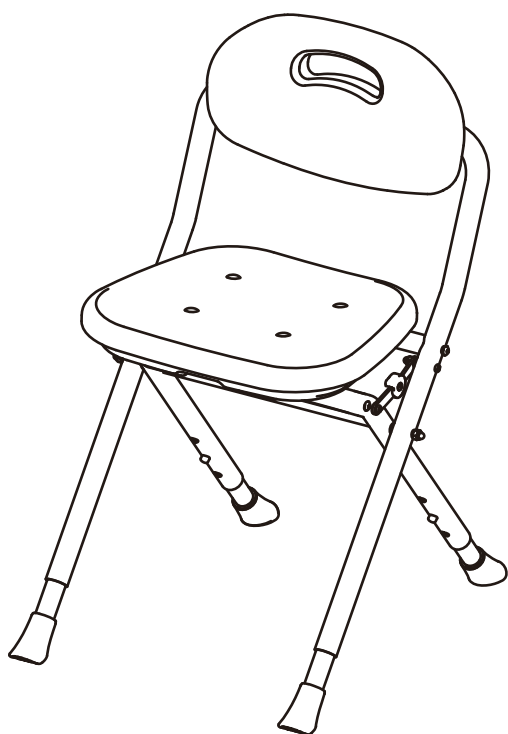

目次

ご使用前の注意	1 P
ご使用上の注意	1 P
お手入れ方法	2 P
各部の名称と製品仕様	2 P
ご使用方法	3 P
組み立て方・折りたたみ方	3 P
延長パイプの取り付け方・ 高さ調節方法	4 P
パッドの取りはずし方・ 取り付け方	4 P

福祉用具総合メーカー

 **株式会社 幸和製作所**

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート】10時～17時(土・日・祝日を除く)

 **0120-508-058**
フリーコール フリーコール コーワ オーコーワ

<http://www.tacaof.co.jp>

ご使用前の注意

警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 各部のサビや腐食、ネジのゆるみなど問題がないことを確認してから使用してください。
- パイプに変形はないか、脚キャップにひび割れ・破れ・磨耗による異常はないかなど、各部をかならず点検してください。
- 脚キャップが確実に取り付けられていることを確認してください。
- 延長パイプがすべて同じ高さに設定されていることを確認してください。
- 介助をするときは、使用者の状態を十分把握してから使用してください。

ご使用上の注意

警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 購入する際は、購入先や専門家などに、適切な選択やフィッティングについて相談をしてください。
- 使用者が自分の身体を十分に安定させられないときは、介助者の方が付き添ってください。
- 踏み台として使用したり、飛び乗ったりしないでください。
- 浴室内の平らで安定した場所に置いて使用してください。
- 座面を押さえつけて、ぐらつきがないか確認し、万が一ぐらつく場合は座面および延長パイプが確実に固定されていることを確認してください。
- 最大使用者体重をかならず守ってください。
- 浴室内のイス以外の用途には、使用しないでください。
- 背もたれを手すり代わりに持たないでください。
- 身体を大きくのけぞって背もたれに体重をかけすぎないでください。

注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 入浴動作は、身体を確実に安定させ、ゆっくりと行ってください。
- 熱湯をかけないでください。製品本体の変形や、やけどの原因になります。
- サウナ等の高温の場所で使用しないでください。また、直射日光などを当てないでください。パッドが変形するおそれがあります。
- 滑りやすい床では使用しないでください。
- 石けん水やシャンプーなどで座面や床と接する部分が滑りやすくなるので、注意してください。
- 人が乗った状態で移動させないでください。
- 水中に沈めて使用したり、洗ったりしないでください。
- まれに、もらい錆が発生することがありますので、まめにお手入れを行ってください。


お手入れ方法

- 柔らかい布やスポンジに、うすめた浴室用中性洗剤を含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流してください。その後、陰干しあるいは乾いた布で乾拭きしてください。
- タワシや研磨剤入りのスポンジ、磨き粉などは使用しないでください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチック、パイプ、固定部品（ネジなど）の劣化や破損をまねくことがあります。

保管方法

- 床の材質、表面加工などによっては、脚ゴムが床に付着、色移り、変色する場合があります。長時間、保管する場合は、直接床に置かないようにしてください。

各部の名称と製品仕様

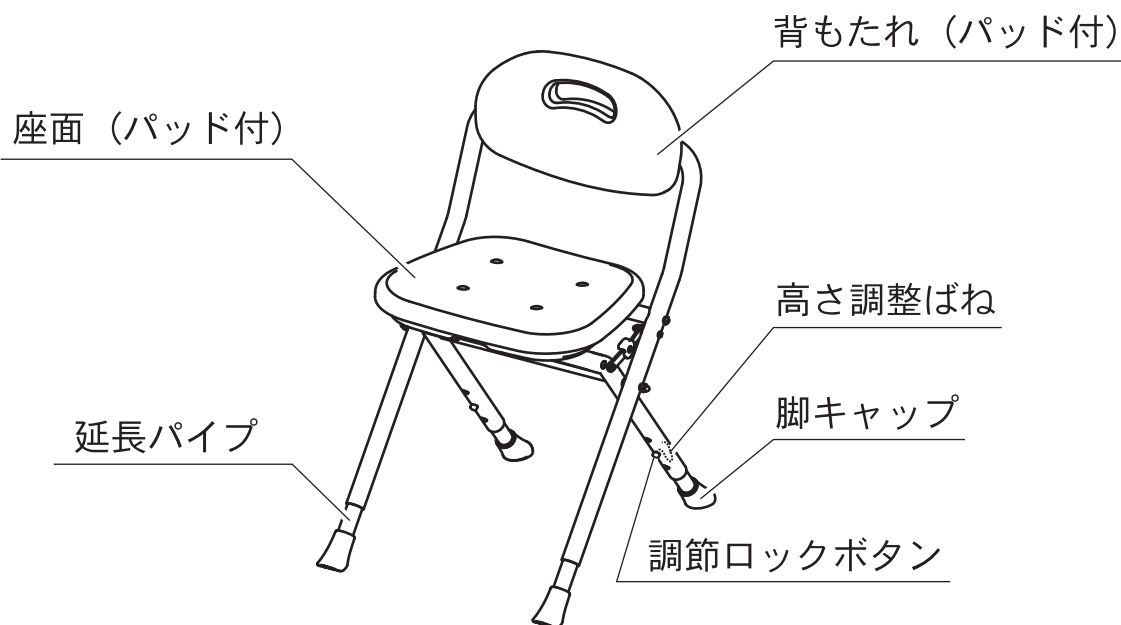

組み立て寸法	幅400×奥行440～540×高さ630～690mm		
折りたたみ寸法	幅400×奥行130×高さ735mm		
座面高さ	370～430mm 3ポジション	座面寸法	幅345×奥行300mm
最大使用者体重	80kg	重量	2.3kg
材質	パイプ：アルミニウム合金、座面/背もたれ：ポリエチレン パッド：EVA樹脂、脚キャップ：EVA樹脂 調節ロックボタン：ステンレス鋼、高さ調整ばね：ステンレス ねじ：ステンレス鋼		

※各寸法、重量は参考数値です。

ご使用方法

浴室の洗い場で、シャワーを浴びたり、身体を洗う際にご使用ください。


⚠️ 注意

- ツルツルとした小さいタイルが埋め込まれた洗い場では、使用しないでください。


組み立て方・折りたたみ方

■組み立て方

1

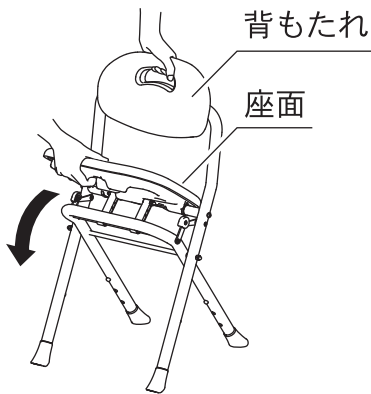


2

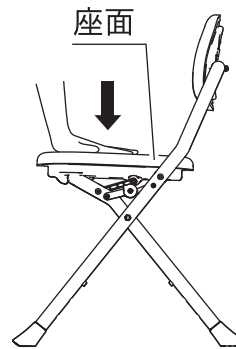

背もたれを持って座面を矢印の方向へさげてください。
その後、座面を上からしっかり押さえてください。

■折りたたみ方

1

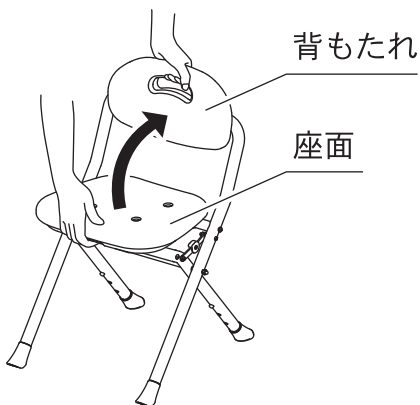

2




背もたれを持って座面を矢印の方向へあげてください。

⚠️ 注意

- 手や指をはさまないように十分注意してください。
- 座面が確実に押し上げられていることを確認してから使用してください。

延長パイプの取り付け方・高さの調節方法

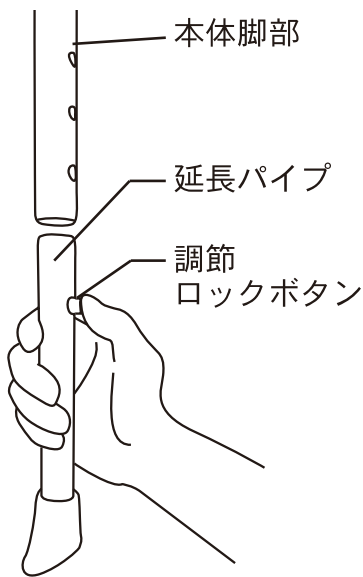

【延長パイプの取り付け方】

延長パイプの調節ロックボタンを押しながら、本体脚部に差し込んでください。取りはずすときは、調節ロックボタンを押しながら延長パイプを引き抜いてください。

【高さの調節方法】


調節ロックボタンを押しながら延長パイプを上下させ、設定したい高さの穴に合わせてください。その後、調節ロックボタンが確実に穴から出ていることを確認してください。

⚠ 注意

- 延長パイプが固定されていることをかならず確認してから使用してください。
- 延長パイプがすべて同じ高さに設定されていることをかならず確認してください。

パッドの取りはずし方・取り付け方

背もたれ、座面のパッドは取りはずして洗うことができます。

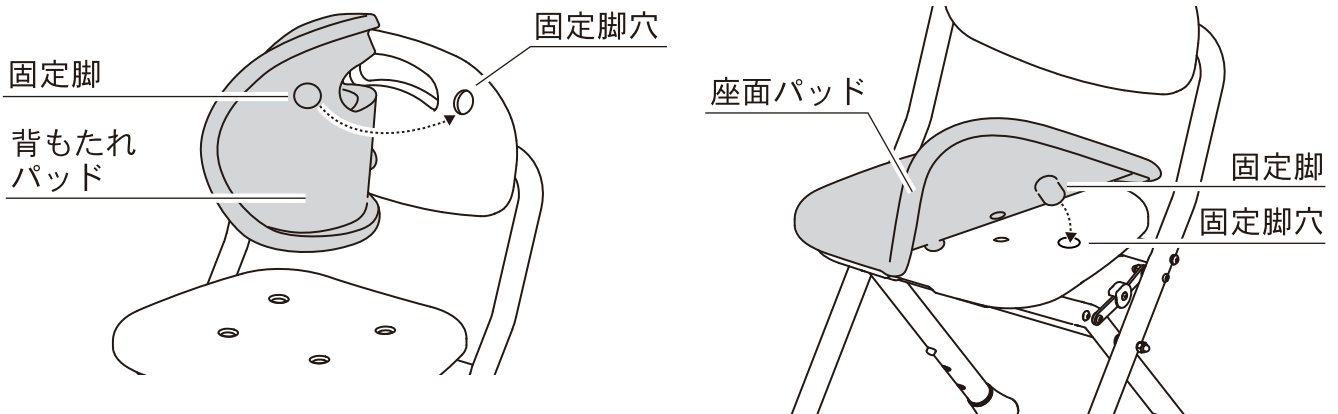

■取りはずし方

背もたれ、座面それぞれの裏側から固定脚を押し出してください。

■取り付け方

背もたれパッドの固定脚を背もたれの固定脚穴に合わせて押し込んでください。座面パッドの固定脚を座面の固定脚穴に合わせて押し込み、縁を座面にかぶせてください。

⚠ 注意

- パッドの前後を間違えないように注意してください。
- パッドが確実に取り付けられていることを確認してください。

TAKE CARE OF
Tacaof

<http://www.tacaof.co.jp>

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、
ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。
そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品をほかの方にお譲りになるときは、かならず本書もあわせてお渡してください。