

TAKE CARE OF
TacaoF


品名 おとなりカート
ボックスタイプ

品番 WCC03

取扱説明書

この製品は買い物などの際、荷物を入れて運ぶためのものです。身体を支えることができる設計にしておりますが、手すりにつかまらなければ歩行できない方、介助者がいなければ歩行できない方の使用には適しません。シルバーカー、歩行車の用途には使用しないでください。

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。

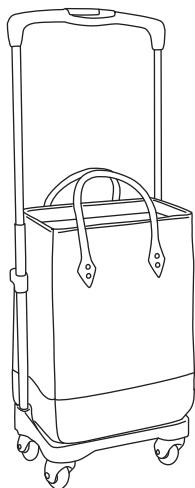

目次

ご使用前の注意	1 P
ご使用上の注意	1~3 P
お手入れ方法	3 P
保管方法	3 P
各部の名称と製品仕様	4 P
持ち手高さの調節方法	5 P
袋の取りはずし方	
・取り付け方	6 P

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459
<https://kowa-seisakusho.co.jp/>

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

転倒や事故防止のため、下記の事項をかならず守ってください。

ご使用前の注意

以下の方はご使用にならないでください。



警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 杖なしでは歩行できない方。（手すりにつかまらなければ歩行できない方や、介助者がいなければ歩行できない方。）
- リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。



注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 高さ調整および袋の取り付けをするときは周囲に人がいないことを確認してください。
- 高さ調整および袋の取り付けは確実に行ってください。また指などをはさまないように注意してください。
- 使用前に各部を点検してください。
- 各部の留め金具（カシメ・鉛・ネジ・ナットなど）がゆるんでいないことを確認してください。
- 持ち手が固定されていることを確認してください。固定されていないと、使用中に高さが変わることがあり危険です。

ご使用上の注意



警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 持ち手に荷物を吊りさげないでください。バランスを崩し危険です。
- 走って使用しないでください。転倒や事故に繋がるおそれがあります。
- 持ち手に体重をかけると、転倒などのおそれがあります。

ご使用上の注意

！注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 不整地での使用、段差や溝、踏切横断時では車輪がはまつてしまい転倒するおそれがありますので注意してください。手前でかならず一旦止まり、十分注意して慎重に越えてください。
- 段差のあるところで荷物を入れたまま引くと、車輪、フレームなどが破損することがありますので十分注意してください。
- 階段での引きおろしをしないでください。
- 荷物を入れたまま高い所から落下させると、車輪・フレームなどが破損することがありますので十分注意してください。
- 袋内に15kg以上の重さの荷物を入れて使用しないでください。
- 重い荷物は袋の下部に収納してください。
- エスカレータで移動するときは、製品が落下しないよう置く場所に注意して持ち手をしっかり握ってください。
- 雨や風が強いときは、使用しないでください。
- シルバーカー・イス・踏み台・人を乗せるなどの用途には使用しないでください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- 持ち手を収納するときは、手をはさまないように注意してください。
- 身体を支える際、持ち手に対し垂直に体重がかかるように使用してください。斜めから体重をかけると転倒などのおそれがあります。
- 勢いよく持ち手部分に負荷をかけないでください。過度な荷重がかかり変形、破損、転倒のおそれがあります。
- 最大使用者体重をかならず守ってください。
- 坂道など、平坦ではない場所で体を支えないでください。転倒のおそれがあります。

ご使用上の注意

!**注意**

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 路面の状態によっては、転倒のおそれがあります。十分に注意してください。
- 立ち座りの際、手すりがわりに使用しないでください。
- 飛行機搭乗時の預け入れ荷物にはできません。また、飛行機内への持ち込みは、航空会社の指示に従ってください。
- ナイフ等鋭利なものは中に入れないでください。
- この製品は4輪走行で押し歩くことを前提としています。使用状況によっては2輪走行でも問題ありませんが、車輪の片減りや荷台フレームの破損を防ぐため、できる限り4輪での走行をおすすめいたします。段差や急斜面の移動には十分にご注意ください。


お手入れ方法

- 雨などで濡れたときは乾いた布で拭き取ってください。泥やほこりがついたときは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。
- 袋の汚れは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後よく乾かしてください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチックの劣化や破損をまねくことがあります。

保管方法

- 屋内で保管してください。また、長期間使用しないときは、汚れを落としてから保管してください。
- 雨ざらしになる場所、また高温多湿な場所では保管しないでください。故障や変形の原因となります。

各部の名称と製品仕様

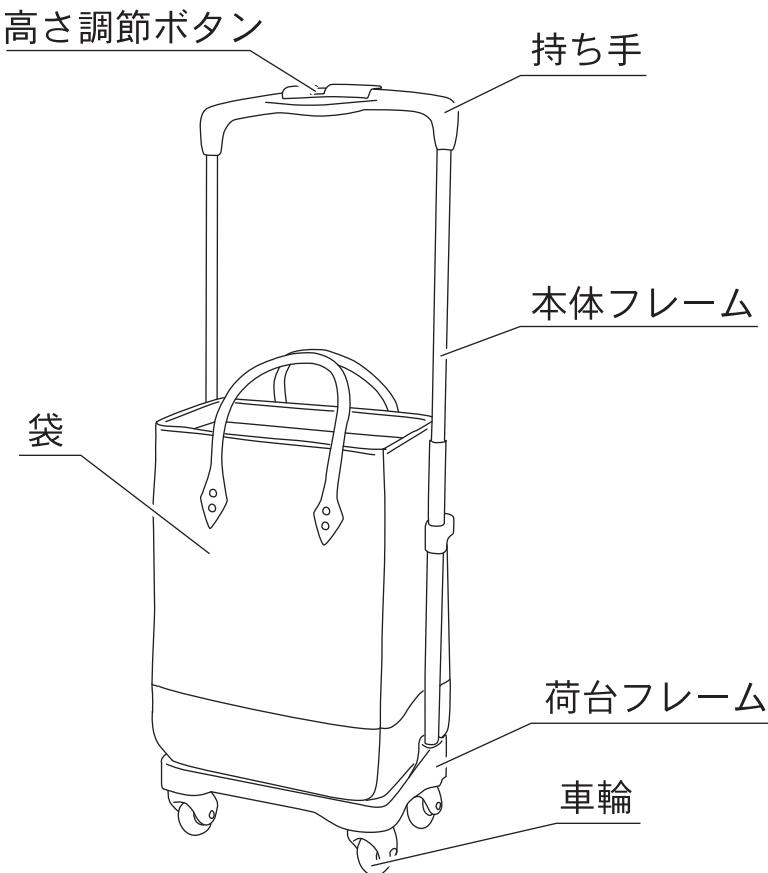


組み立て寸法	幅315×奥行200×高さ700~860mm		
持ち手 高さ	高さ700~860mm (5ポジション)		
本体材質	アルミニウム合金	車輪材質	エラストマー
袋寸法	幅280×奥行195×高さ370mm		
重量	2.2kg		
袋材質	ナイロン	最大積載量	15kg
最大使用者体重	80kg	最大持ち手耐荷重	40kg


※各寸法・重量は参考数値です。

持ち手高さの調節方法

1

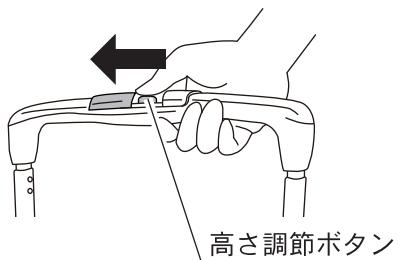


2

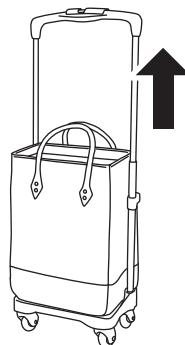

持ち手の上部のカバーを横にスライドさせてください。

高さ調節ボタンを押しながらカチッと音が鳴るまで最上部に引きあげてください。

3

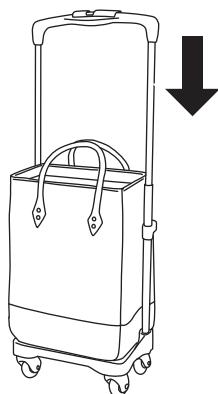

高さ調節ボタンを押しながら持ち手をさげ、好みの高さでボタンをはなし、持ち手が固定されたことを確認してください。


△注意

- 持ち手をさげるときは、体重をかけないでください。バランスをくずし、転倒するおそれがあります。
- 持ち手が固定されていることを確認してから使用してください。
- かならず持ち手を最上部まで引き上げてから高さ調節をしてください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- 持ち手を収納するときは、手をはさまないように注意してください。

袋の取りはずし方・取り付け方


【取りはずし方】

1

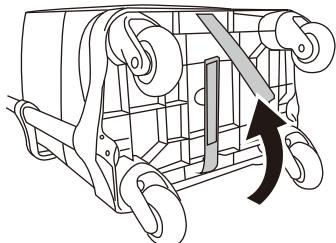



袋下部にあるベルトの面ファスナーを取りはずしてください。

2

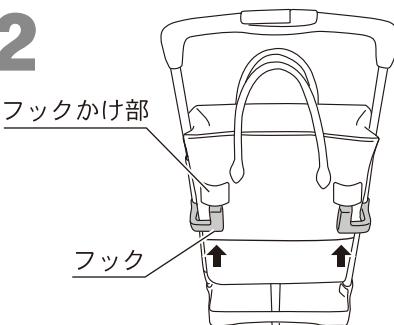


袋背面にあるフックかけ部を本体フレームのフックから取りはずしてください。

3

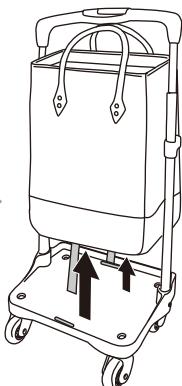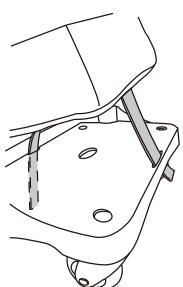

袋下部にあるベルトを取りはずしてください。

【取り付け方】

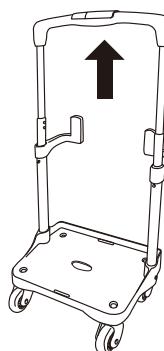

袋の取り付けは持ち手をあげた状態で行ってください。取り付けの際は取りはずし方と逆の手順で取り付けてください。

！注意

- 袋を取り付けた際は、袋が確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

TAKE CARE OF
TacaoF

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、
ご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。
そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険があります。

※本製品をほかの方にお譲りになるときは、かならず本書も
あわせてお渡しください。