

杖用自立先ゴム

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、読み終わったあとは大切に保管してください。


使用方法

- ① 杖の先ゴムをはずして上ネジをゆるめ、製品を杖の先に取り付けてください。
※はずれないよう、強く押し込んでください。



※杖の直径に合わせて、上ネジを付け替えてください。

- ② 下ネジを手で押さえながら、上ネジを回してしっかりと固定してください。

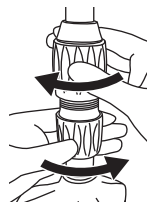

安全に関する注意事項

- この製品は直径が**16mmと19mmの杖(幸和製作所の杖)専用**です。それ以外の杖には使用しないでください。
- ご使用前に、杖が製品にしっかり入っていること、確実に取り付けられていることを確認してからご使用ください。
- 折りたたみ杖に製品を取り付けると、まれに折りたたまれることがあるので注意してください。
- 歩行補助杖以外の杖(登山用など)や他の用途には使用しないでください。木製の杖には使用できません。
- ゴム部分が摩耗したまま使用すると危険です。定期的に点検してください。
- ご使用の杖の取扱説明書を再度お読みいただき、記載してある注意事項をお守りください。
- SGマークがついている杖に、この製品を取り付けるとSGマーク対象外となります。

品質表示

品番	CAP08-BK
品名	杖用自立先ゴム
材質	支柱:ポリアセタール/ネジ 上部分:熱可塑性エラストマー/軸:ポリプロピレン/上 下ネジ:ナイロン、グラスファイバー/ベース:ABS樹脂/ ゴム部:熱可塑性エラストマー
寸法	幅98×奥行85×高さ144mm
重量	200g
色	ブラック




MADE IN TAIWAN

株式会社 幸和製作所


〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459

杖の直径

16mm

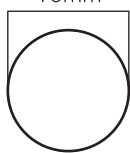

19mm

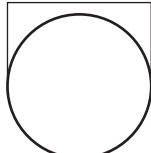

●お使いの杖をあて、直径をご確認ください。

CAP08-BK 杖用自立先ゴム



4 9 3 8 7 6 5 0 0 9 4 2 5