

Tacaof

品名

ティコブワンタッチ
折りたたみシャワーチェア(ミドル)


品番

BSU11

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならず
お読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。
製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店
もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。

目 次

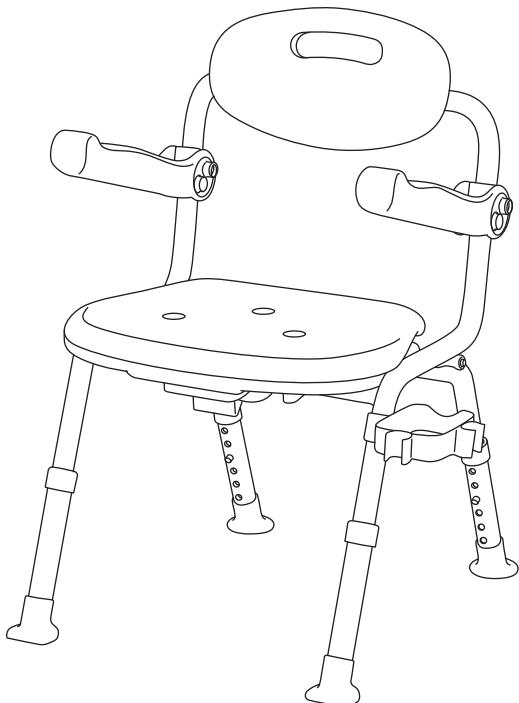

| | |
|-------------------|---------|
| ご使用前の注意 | 1 P |
| ご使用上の注意 | 1 ~ 2 P |
| お手入れ方法 | 2 P |
| 保管方法 | 2 P |
| 各部の名称と製品仕様 | 3 P |
| ご使用方法 | 4 P |
| 組み立て方・折りたたみ方 | 5 P |
| 座面高さの調節方法 | 6 P |
| パッドの取りはずし方・取り付け方 | 6 P |
| シャワーフック付トレイのご使用方法 | 7 P |
| 肘かけ高さの調整方法 | 8 P |
| 肘かけの取りはずし方・取り付け方 | 9 P |
| 肘かけの使用例 | 9 P |
| 脚ゴムの取りはずし方・取り付け方 | 10 P |
| 交換部品のご案内 | 10 P |

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご使用前の注意



警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 各部のサビや腐食、ネジのゆるみなど問題がないことを確認してから使用してください。
- パイプに変形はないか、脚ゴムにひび割れ・破れ・磨耗による異常はないかなど、各部をかならず点検してください。
- 脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認してください。
- 延長パイプがすべて同じ高さに設定されていることを確認してください。
- 4本の脚がすべて同じ高さであることを確認してから使用してください。
- 介助をするときは、使用者の状態を十分把握してから使用してください。

ご使用上の注意



警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 購入する際は、購入先や専門家などに、適切な選択やフィッティングについて相談をしてください。
- 使用者が自分の身体を十分に安定させられないときは、介助者の方が付き添ってください。
- 踏み台として使用したり、飛び乗ったりしないでください。
- 浴室内の平らで安定した場所に置いて使用してください。
- 座面を押さえつけて、ぐらつきがないか確認し、万が一ぐらつく場合は座面および延長パイプが確実に固定されていることを確認してください。
- 最大使用者体重をかならず守ってください。
- 浴室内のイス以外の用途には、使用しないでください。
- 背もたれや肘かけを手すり代わりに持たないでください。
- 身体を大きくのけぞって背もたれに体重をかけすぎないでください。また、片側の肘かけだけに体重をかけすぎないでください。
- 座面のフチに座る、背もたれに座る、肘かけに座るなど、座面の中央以外に座らないでください。製品が破損したり転倒するおそれがあります。
- 2人以上同時に座らないでください。転倒するおそれがあります。
- 浴室の洗い場以外で使用しないでください。
- 修理や改造はしないでください。本体機能が正常にはたらかず、ケガの原因になります。
- 上体を後方に大きく傾け肘かけに体重をかけすぎないでください。転倒してケガをするおそれがあります。
- 横方向に強い力をかけないでください。転倒してケガをするおそれがあります。
- 故意にゆすらないでください。転倒してケガをするおそれがあります。
- 製品を折りたたむときに指をはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。
- 座面の水抜き穴に手指や足指を入れないでください。指が抜けなくなりケガの原因になります。
- 座面が確実にロックされていることを確認してください。転倒してケガをするおそれがあります。

ご使用上の注意

！注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 入浴動作は、身体を確実に安定させ、ゆっくりと行ってください。
- 肘かけだけを持って、引っぱったり、持ちあげたりしないでください。
- 熱湯をかけないでください。製品本体の変形や、やけどの原因になります。
- サウナ等の高温の場所で使用しないでください。また、直射日光などを当てないでください。パッドが変形するおそれがあります。
- 滑りやすい床では使用しないでください。
- 石けん水やシャンプーなどで座面や床と接する部分が滑りやすくなるので、注意してください。
- 人が乗った状態で移動させないでください。
- 水中に沈めて使用したり、洗ったりしないでください。
- まれに、もらい錆が発生することがありますので、まめにお手入れを行ってください。
- 温泉水や硫黄系の入浴剤を使用しないでください。腐食の原因となりパイプや樹脂が破損しケガをするおそれがあります。
- 火気に近づけないでください。火災や変形の原因となります。


お手入れ方法

- 柔らかい布やスポンジに、うすめた浴室用中性洗剤を含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流してください。その後、陰干しあるいは乾いた布で乾拭きしてください。
- タワシや研磨剤入りのスポンジ、磨き粉などは使用しないでください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチック、パイプ、固定部品（ネジなど）の劣化や破損をまねくことがあります。

保管方法

- 床の材質、表面加工などによっては、脚ゴムが床に付着、色移り、変色する場合があります。長時間、保管する場合は、直接床に置かないようにしてください。
- 屋外に放置したり、直射日光下に置かないでください。劣化および変色の原因になります。
- 製品を折りたたんだ状態で保管するとき
立てて置くとき………平坦で安定する場所に置いてください。
横にして置くとき………本体の上に重いものを置いたりしないでください。
- 浴室乾燥機の吹き出し口近くには保管しないでください。クッションが縮み、取り付けができなくなることがあります。

各部の名称と製品仕様

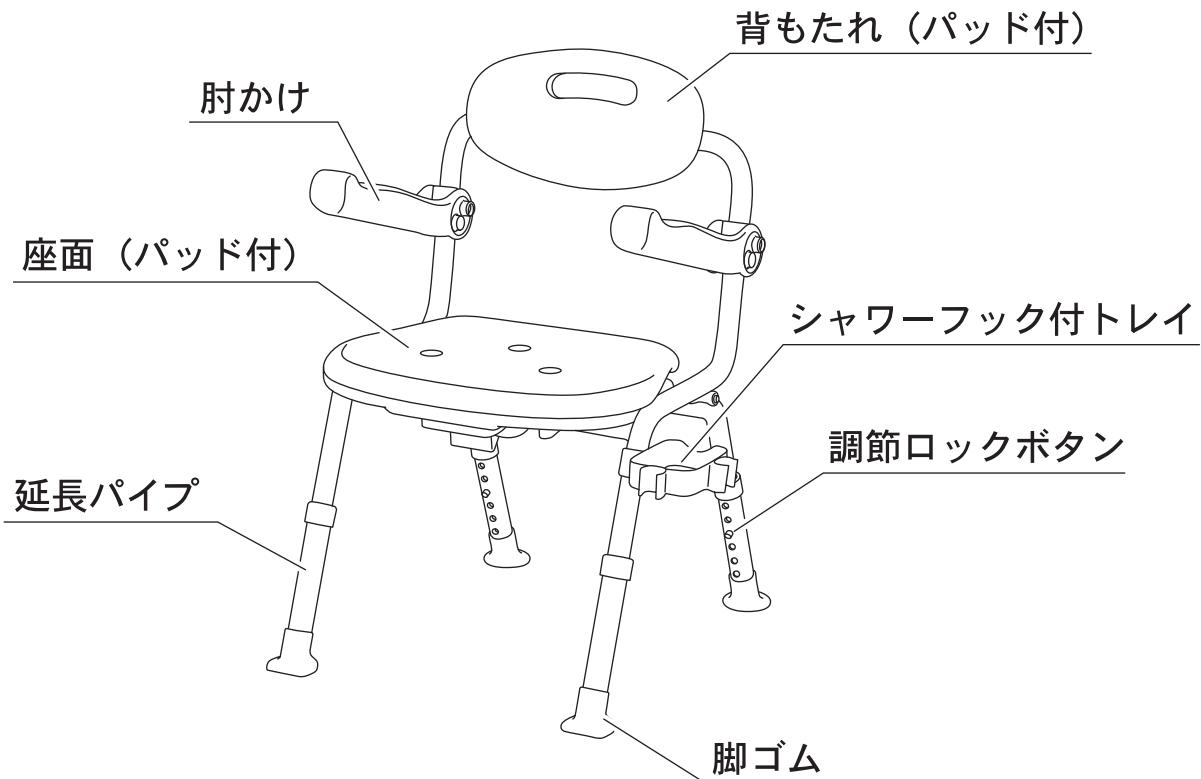

| | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 組み立て寸法 | 幅465×奥行495～575×高さ650～750 mm | | |
| 折りたたみ寸法 | 幅465×奥行230×高さ820 mm | | |
| 座面高さ | 320～420 mm 6ポジション | 座面寸法 | 幅425×奥行335mm |
| 肘かけ高さ (座面から) | 上段：230 mm | 中段：200 mm | 下段：170 mm |
| 最大使用者体重 | 100 kg | 重量 | 4.5 kg |
| 材質 | パイプ：アルミニウム合金 座面・背もたれ：ポリエチレン | パッド | EVA樹脂 脚ゴム：EVA樹脂 |

※各寸法、重量は参考数値です。

※購入時の肘かけの高さは中段です。

■防カビ加工について

本製品はパッドと脚ゴムに防カビ加工を施しています。

- | | |
|-------|---|
| 防カビ部位 | <ul style="list-style-type: none"> パッド（座面・背もたれ・肘かけ） 脚ゴム |
|-------|---|


- ！注意** ● 使用条件によってはカビが発生する場合があります。
 ● 防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。

ご使用方法

浴室の洗い場で、シャワーを浴びたり、身体を洗う際にご使用ください。
また、肘かけが上にあがるので、座ったまま楽に身体の向きを変え、移乗することができます。

身体状況などに合わせて、座面高さと肘かけ高さを調整してください。
座面高さは P6 座面高さの調節方法、肘かけ高さは P8 肘かけ高さの調節方法を確認してください。

■浴槽内への移乗のしかた

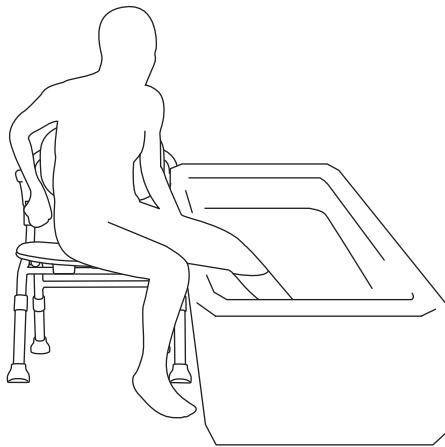

- 1** シャワーチェアをできるだけ浴槽に近づけ、浴槽側の肘かけをあげてください。
- 2** 身体の向きを変え、片足ずつゆっくりと浴槽の中へ入ってください。


⚠ 注意

- ツルツルとした小さいタイルが埋め込まれた洗い場では、使用しないでください。
- 浴槽内への移乗は、身体を確実に安定させてゆっくりと行ってください。


組み立て方・折りたたみ方

■組み立て方


- 1 背もたれを持って座面を矢印の方向へさげてください。

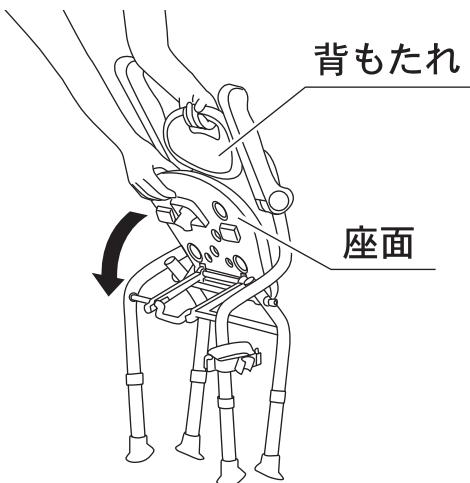

- 2 座面が水平となっており、ロックがかかっていることを確認してください。

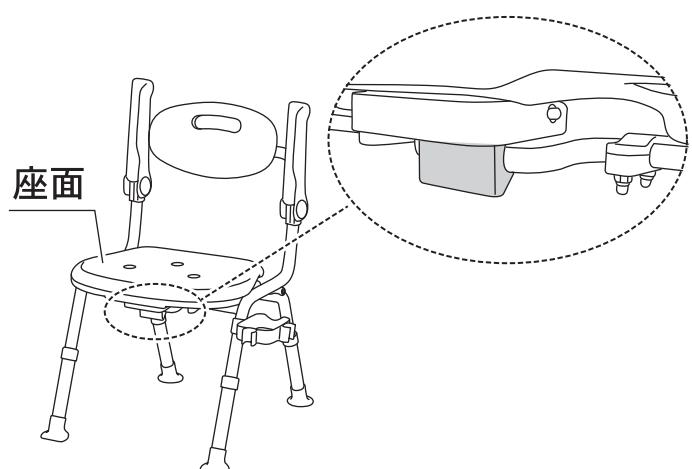


- 3 座面を上からしっかりと押さえ、左右の肘かけをさげてください。

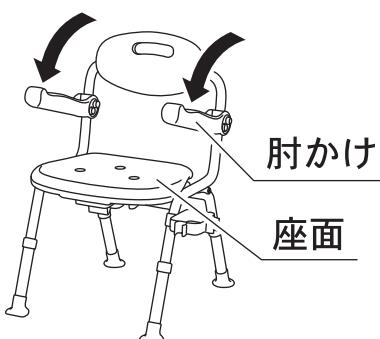


■折りたたみ方

- 1 左右の肘かけをあげてください。

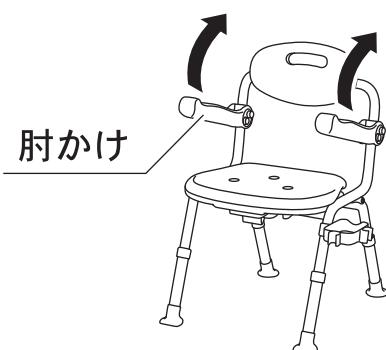

- 2 座面先端のロック部を持ち、座面を矢印の方向にあげてください。

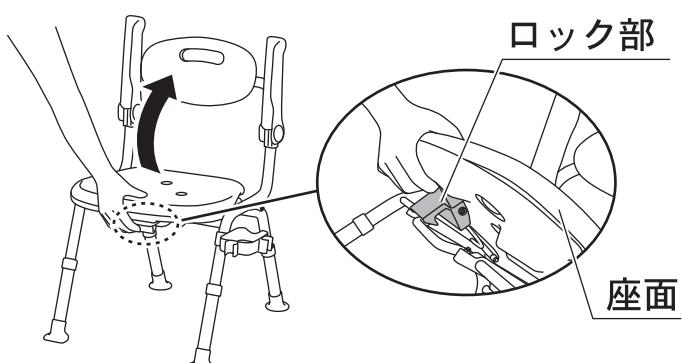


● 注意

- 手や指をはさまないように十分注意してください。
- 座面が確実に押しさげられ、ロックされていることを確認してから使用してください。
- 折りたたみむ際は、先に肘かけを跳ねあげてから折りたたんでください。
- 持ち運ぶ際は、ロック部を持たず、背もたれを持って運んでください。

折りたたんだ状態
でも自立します。



座面高さの調節方法

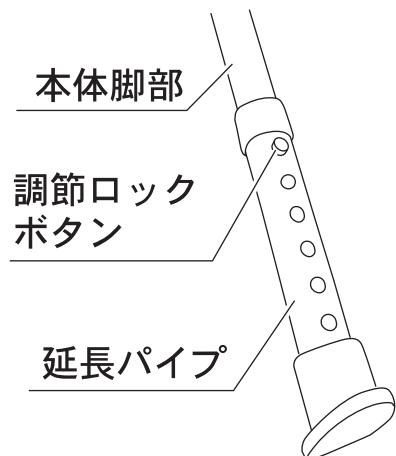

【延長パイプの取り付け方】

本体脚部の調節ロックボタンを押しながら延長パイプを本体脚部に差し込んでください。取りはずすときは、調節ロックボタンを押しながら延長パイプを引き抜いてください。

【高さの調節方法】


調節ロックボタンを押しながら延長パイプを上下させ、設定したい高さの穴に合わせてください。その後、調節ロックボタンが確実に穴から出ていることを確認してください。

!**注意**

- 延長パイプが固定されていることをかならず確認してから使用してください。
- 延長パイプがすべて同じ高さに設定されていることをかならず確認してください。

パッドの取りはずし方・取り付け方

背もたれ、座面のパッドは取りはずして洗うことができます。

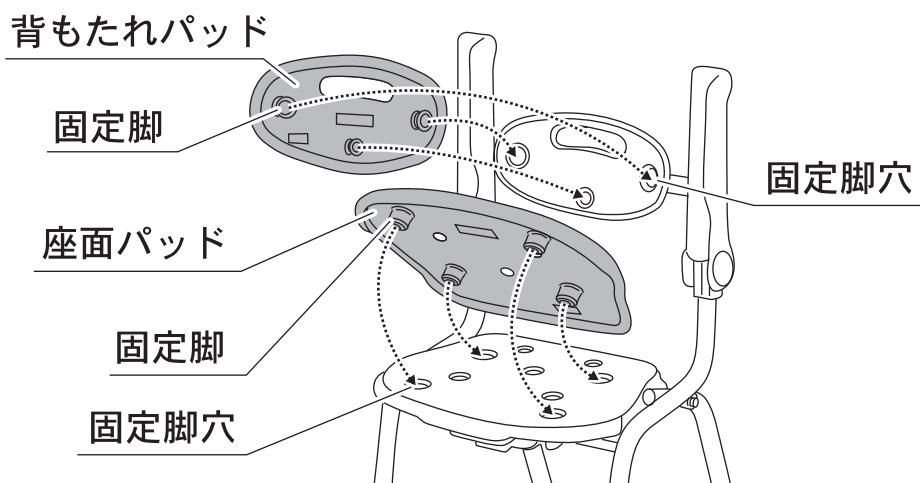

■取りはずし方

背もたれ、座面それぞれの裏側から固定脚を押し出してください。

■取り付け方



パッドの固定脚を背もたれ、座面それぞれの固定脚穴に合わせて押し込み、パッドの縁を座面・背もたれにかぶせてください。

!**注意**



- パッドの前後を間違えないように注意してください。
- パッドが確実に取り付けられていることを確認してください。

シャワーフック付トレイのご使用方法

シャワーフック付トレイは、一時的にシャワーHEADをかける、または、タオルやスポンジ、石鹼などを置いておくことができます。必要に応じて、シャワーフック付トレイを取り付け、取りはずししてください。

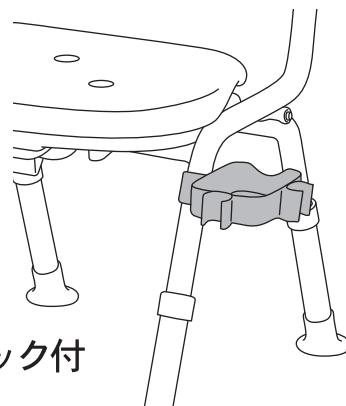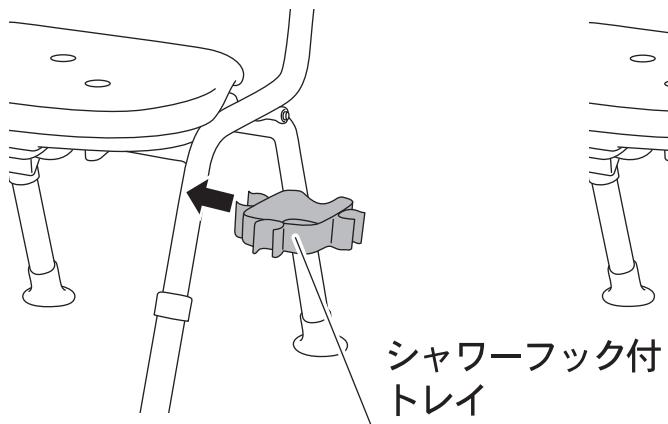

<使用例>

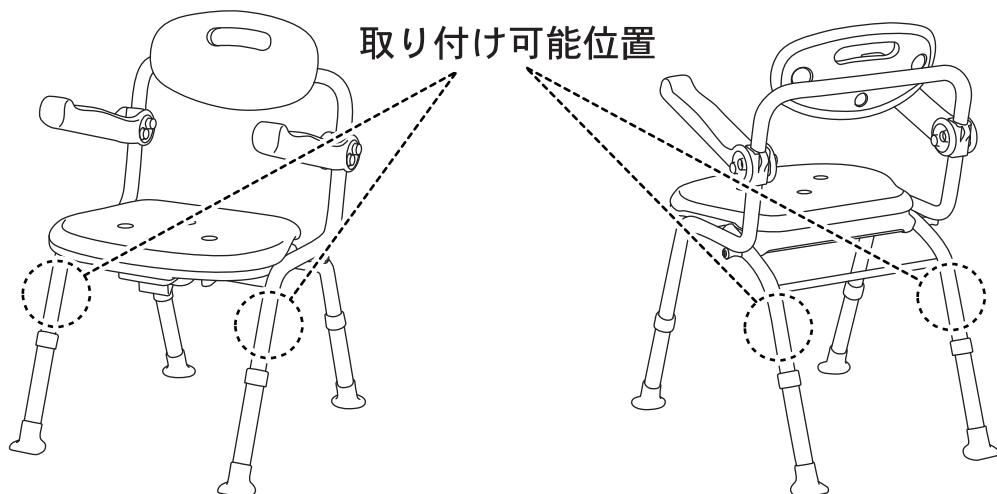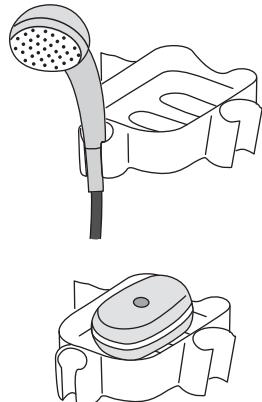


- 手や指をはさまないように十分注意してください。
- 取り付け可能位置以外には取り付けないでください。破損やケガをするおそれがあります。
- シャワーHEADをかける際は、シャワーを止めてからかけてください。シャワーHEADがシャワーフック付トレイからはずれる可能性があります。
- 入浴後は、シャワーフック付トレイにシャワーHEADをかけたままにしないでください。破損や変形の原因となります。
- 本体を折りたたむ際は、シャワーフック付トレイに物を置かないでください。破損や変形の原因となります。


⚠ 注意

肘かけ高さの調整方法


- 1 肘かけの軸ねじを付属の六角レンチで取りはずし、ひじ掛けを取りはずしてください。

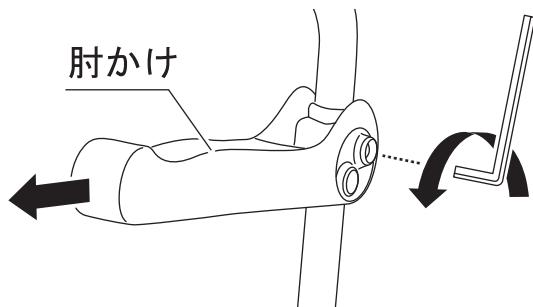

- 2 肘かけ固定樹脂を上下方向に調整し、前脚フレームの設定したい高さの穴に合わせてください。

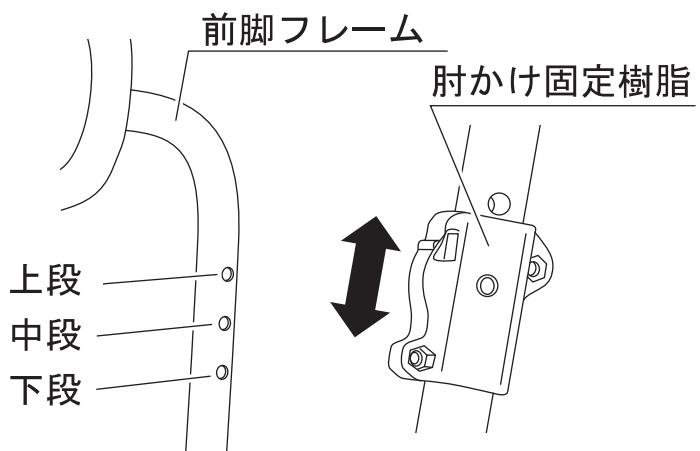


- 3 肘かけの軸を肘かけ固定樹脂の穴と合わせ、肘かけの軸ねじを付属の六角レンチで取り付け、締め込んでください。

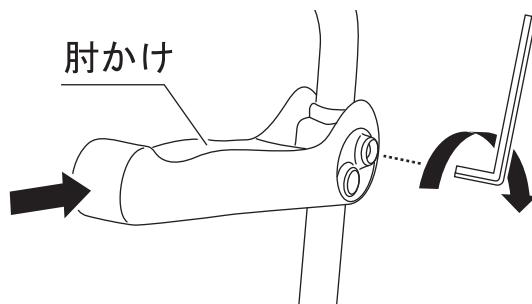


肘かけの取りはずし方・取り付け方

■肘かけの取りはずし方


- 1 肘かけの軸ねじを付属の六角レンチで取りはずし、肘かけを取りはずしてください。

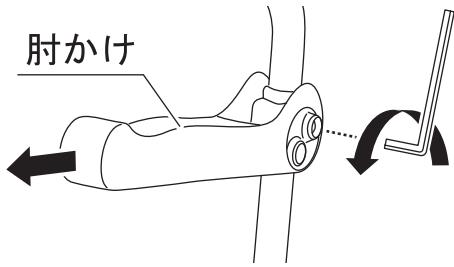

- 2 肘かけ固定樹脂のねじを2か所プラスドライバーで取りはずし、肘かけ固定樹脂を取りはずしてください。

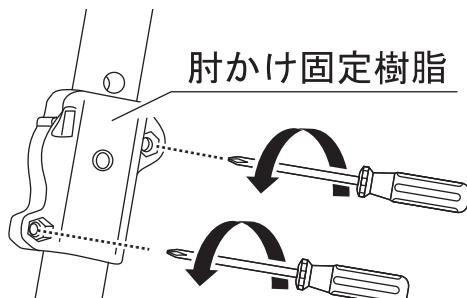

- 3 肘かけ固定樹脂を図の様に前脚フレームから取りはずしてください。

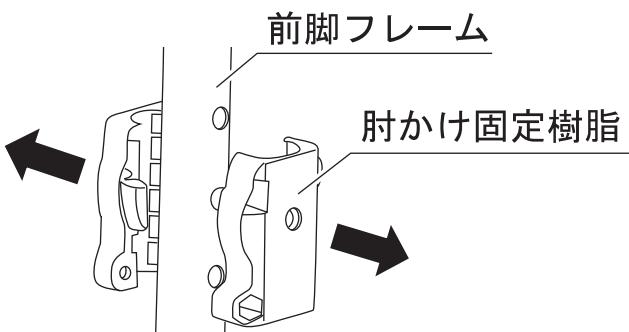

■肘かけの取り付け方


肘かけの取りはずし方 1～3と逆の手順で取り付けてください。

● 注意


- 肘かけを取り付けたあと、肘かけががたつきがなく、しっかりと取り付けられていることを確認してください。肘かけが破損し、ケガをするおそれがあります。がたつきがある場合、肘かけの軸ネジを増し締めしてください。

肘かけの使用例


肘かけあり

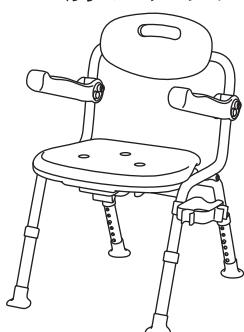


肘かけ高さ最大時

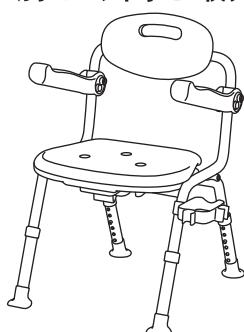


肘かけ片方のみ

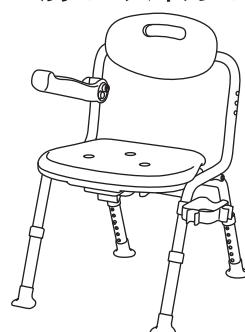


肘かけなし

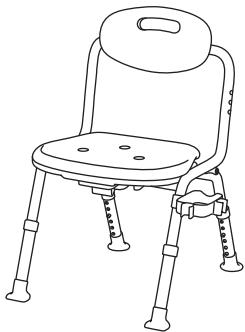

肘かけ高さ最小時

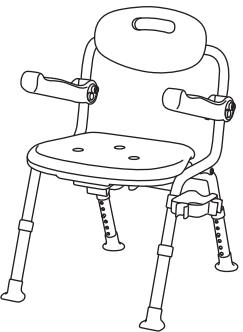


肘かけ左右高さ違い

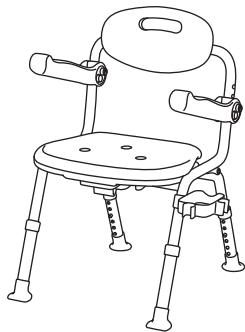

脚ゴムの取りはずし方・取り付け方


■取りはずし方

交換する脚ゴムを引き抜いてください。
※ねじりながら引き抜くと取りはずしやすくなります。

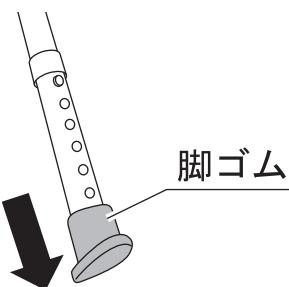

■取り付け方

脚ゴムの△マークと延長パイプの△マークの位置を合わせ、延長パイプの△マークと脚ゴムの上端が合うところまで差し込んでください。

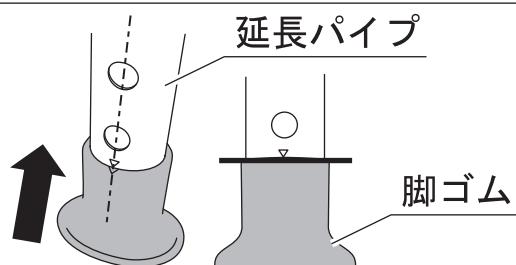

▲注意 取り付け後、4本の脚が確実に接地していることを確認してください。

交換部品のご案内

下記部品は交換部品としてお買い求めいただけます。部品が汚れる、または破損した場合は交換してください。

| 部品名 | 品 番 | 色 | 内 容 | 交換方法 |
|-------------|--------------|---------|--|---------------------------|
| 背もたれパッド | BSU11-BL-P01 | ブルー | ・背もたれパッド × 1 個 | P.6 「パッドの取りはずし方・取り付け方」参照 |
| | BSU11-DA-P02 | レッドオレンジ | | |
| 座面パッド | BSU11-BL-P03 | ブルー | ・座面パッド × 1 個 | P.6 「パッドの取りはずし方・取り付け方」参照 |
| | BSU11-DA-P04 | レッドオレンジ | | |
| 肘かけ(右) | BSU11-BL-P05 | ブルー | ・肘かけ × 1 個 ・M6 ボルト × 1 本 ・M6 ナット × 1 個 ・肘かけ固定樹脂 × 1 セット | P.9 「肘かけの取りはずし方・取り付け方」参照 |
| | BSU11-DA-P06 | レッドオレンジ | | |
| 肘かけ(左) | BSU11-BL-P07 | ブルー | | |
| | BSU11-DA-P08 | レッドオレンジ | | |
| 肘かけ固定部品 | BSU11-SL-P09 | シルバー | ・M6 ボルト × 1 本 ・M6 ナット × 1 個 | 当ページ「脚ゴムの取りはずし方・取り付け方」参照 |
| 脚ゴム 4 個入 | BSU11-GY-P10 | グレー | ・脚ゴム × 4 個 | |
| シャワーフック付トレイ | BSU11-WT-P11 | ホワイト | ・シャワーフック付トレイ × 1 個 | P.7 「シャワーフック付トレイのご使用方法」参照 |

ココロ、ヨロコブ、ティコブ

Tacaof

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、
ご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。
そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品をほかの方にお譲りになるときは、かならず本書もあわせてお渡しください。