

伸縮杖

伸縮杖の正しい使い方



杖状つえ

全長サイズ
69.5 ~ 92cm

CAE17-LM

本体材質	アルミニウム合金
持ち手材質	TPR/ポリプロピレン
重量	350g
カラー	ライムグリーン

ご使用の前に

杖は、杖先が足先の前方外側に置いたとき、肘が30～40度曲がる状態が杖長さを決める際の目安です。

①杖なしでは歩行に支障をきたす場合があります。歩行補助用として、歩行時に杖先が足先の前方外側に置いたとき、肘が30～40度曲がる状態が杖長さを決める際の目安です。

②リハビリ中など、体重の一部を支えるのに、杖先が足先の前方外側に置いたとき、肘が30～40度曲がる状態が杖長さを決める際の目安です。

株式会社 幸和製作所
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1



杖状つえ

伸縮ステッキ 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、読み終わったあとは大切に保管してください。

CAE17-LM



本体材質	アルミニウム合金
持ち手材質	TPR/ポリプロピレン
寸法(全長)	69.5 ~ 92 cm
重量	350 g

※各寸法、重量は参考数値です。



SGマーク制度は、製品の欠陥によって発生した人身事故に対する賠償制度です。

杖状つえ

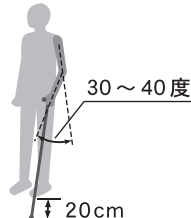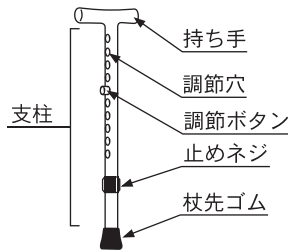


●杖長さの目安

- 杖先を足先の前方外側 20cm の場所に置いたとき、肘が 30 ～ 40 度曲がる状態が杖長さを決める際の目安です。

●長さの調節方法

- 止めネジをゆるめてください。
- 調節ボタンを押しながら、適度な長さに調節してください。
- 止めネジを確実に締めてください。

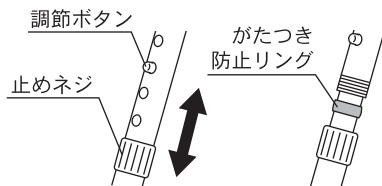


※止めネジの内側には、がたつき防止リングが入っています。長さ調節の際はリングがかならず上右図の位置にあることを確認してください。

⚠注意

- 調節ボタンと止めネジが確実に固定されていることを、かならず確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

●杖の握り方

- 支柱の中心に重心がかかるように握ってください。
- 持ち手の一部分だけを握ると荷重がかたより、不安定になるため大変危険です。

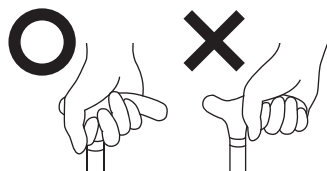

⚠ご使用上の注意

- 身体に合った杖を選んでください。(「ご使用の前に」参照)
- 使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化してはずれやすくなったりした場合は早めに交換してください。
- 使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めネジにゆるみがないことなどを確認してください。
- 濡れたり凍ったりした路面は滑りやすいため、十分に注意してください。
- 床の材質、表面加工などによっては、杖先ゴムが床に付着、色移り、変色する場合があるため、注意してください。
- この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。
- 杖以外の用途(例えば登山・護身など)には使用しないでください。
- 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合があるため、十分に注意してください。
- 握り先端に過大な力をかけるような使い方をしないでください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

●ご使用後・保管方法

- 使用後は、杖先ゴムの底についた砂などを取り除いてください。
- 濡れたときは乾いた布で拭き取り、湿ったままで放置しないでください。
- 塩素系洗剤、シンナー、クレゾール・アルコール類などは絶対に使用しないでください。
- 屋内で保管してください。また長時間使用しない場合は汚れを落としてから保管してください。
- 長期間保管する場合は、直接床に置かないようにしてください。
- 保管時は、ビニール袋に入れたまま保管せず、光のあたらない湿気の少ない場所で保管してください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

株式会社 幸和製作所

〒590-0982
大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 MADE IN CHINA