


この製品は

杖先の直径が、19 mm の杖

（幸和製作所の杖）専用です。

それ以外の杖には使用しないでください。

19mm

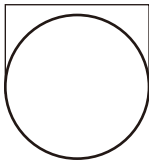


杖先の直径

お使いの杖の杖先を左図に照らし合わせ、直径をご確認ください。

※図は目安です。ご使用前に実際に杖に取り付け確実に取り付けられることをご確認ください。

使用方法

磨耗したゴムをはずし、新しいゴムを杖の先に取り付けてください。

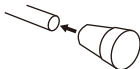

※ゴムがはずれないように、強く押し込んでください。

ご注意

杖先のゴムが磨耗したまま使用すると危険です。定期的に点検し、交換してください。弊社製品以外に取り付けしないでください。

材質：合成ゴム
MADE IN CHINA