


この製品は**杖先の直径が 16mm の杖 (幸和製作所の杖) 専用**です。
それ以外の杖には使用しないでください。

使用方法

磨耗したゴムをはずし、
新しいゴムを杖の先に取り
付けてください。


※ゴムがはずれないように、
強く押し込んでください。

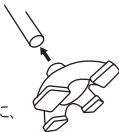

杖先の直径

お使いの杖の杖先を右図に照ら
し合わせ、直径をご確認ください。

※図は目安です。ご使用前に実際
に杖に取り付け確実に取り付けら
れることをご確認ください。

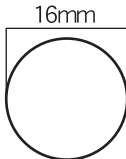

CAP13-BK



4 938765 025500

材質：合成ゴム MADE IN CHINA

ご注意

杖先のゴムが磨耗したまま
使用すると危険です。定期
的に点検し、交換してくだ
さい。弊社製品以外に取り
付けしないでください。

保管方法

長期間保管する場合は、
直接床に置かないように
してください。

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町 3 丁 159 番地 1
TEL:072-238-0459



外箱：PET



紙：台紙