


取り付け方法

クリップ式




取り付け可能な杖サイズ
直径 19～22 mm

リング式

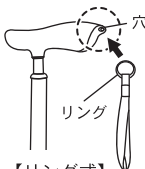

【リング式】
リングを少し開き、
グリップの取付穴に
取り付けてください。

ゴム式

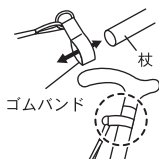

【ゴム式】
新しいストラップのゴ
ムバンドを杖先から通
し、持ち手の付け根に
取り付けてください。
※持ち手側からは取り
付け出来ません。

【クリップ式】

クリップを杖に強く押し付けてく
ださい。クリップが開き、杖には
まります。取り付け後に上下左右
の位置を調節してください。
※杖の長さ調節ボタンに触れな
いように取り付けてください。

【材質】クリップ式：合成皮帯
リング式：ポリプロピレン
ゴム式：ポリプロピレン

CAP14-BK (リング式)



MADE IN CHINA

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459

紙 : 台紙

袋