

一本杖

全長サイズ
91.5cm

ODE05

本体材質	天然木
持ち手材質	天然木
重量	260g
カラー	フラウン

4 9387651700056

ご使用前に

杖は、杖なしで歩行できる方でも、杖を補助的に使用する方でも、杖の使い方は異なります。杖の使い方は、杖の長さ、杖の材質、杖の太さ、杖の先端の形状、杖の握り方などによって異なります。杖の使い方は、杖の長さ、杖の材質、杖の太さ、杖の先端の形状、杖の握り方などによって異なります。

①杖なしでは歩行できない方。(手すりには歩行補助器が取り付けられています。)

②リハビリ中など、体の一部を杖で支える方。(医師などの指導のもとでの使用をみません。)

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1





木製一本杖 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、読み終わったあとは大切に保管してください。

ODE05

本体材質	天然木
持ち手材質	天然木
寸法(全長)	91.5 cm
重量	260 g

※各寸法、重量は参考数値です。

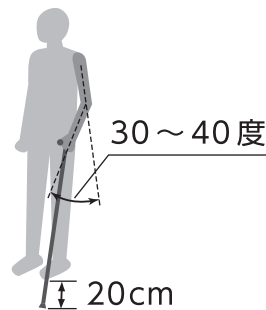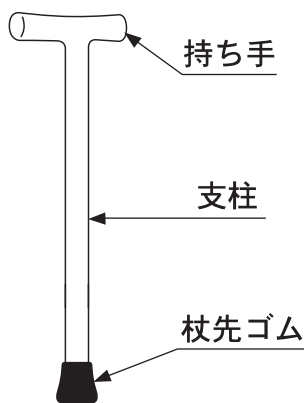


●杖長さの目安

- 杖先を足先の前方外側 20cm の場所に置いたとき、肘が 30 ～ 40 度曲がる状態が杖長さを決める際の目安です。

●杖の握り方

- 支柱の中心に重心がかかるように握ってください。
持ち手の一部分だけを握ると荷重がかたより、不安定になるため大変危険です。

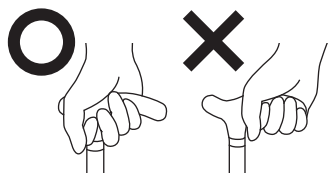

▲ ご使用上の注意

- 身体に合った杖を選んでください。(「ご使用前に」参照)
- 使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化してはずれやすくなったりした場合は早めに交換してください。
- 濡れたり凍ったりした路面は滑りやすいため、十分に注意してください。
- 床の材質、表面加工などによっては、杖先ゴムが床に付着、色移り、変色する場合がありますため、注意してください。
- この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。
- 杖以外の用途(例えば登山・護身など)には使用しないでください。
- 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合がありますため、十分に注意してください。
- 握り先端に過大な力をかけるような使い方をしないでください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

●ご使用后・保管方法

- 使用後は、杖先ゴムの底についた砂などを取り除いてください。
- 濡れたときは乾いた布で拭き取り、湿ったままで放置しないでください。
- 塩素系洗剤、シンナー、クレゾール・アルコール類などは絶対に使用しないでください。
- 屋内で保管してください。また長時間使用しない場合は汚れを落としてから保管してください。
- 長期間保管する場合は、直接床に置かないようにしてください。
- 保管時は、ビニール袋に入れたまま保管せず、光のあたらない湿気の少ない場所で保管してください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

株式会社 幸和製作所

〒590-0982
大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1
TEL:072-238-0459

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 MADE IN CHINA