

# 折りたたみ杖

全長サイズ  
79 ~ 86.5cm

EOP-105

本体材質	アルミニウム合金
持ち手材質	天然木
重量	265g
カラー	ライオン

4 938765701053

## ご使用前に

杖は、杖の先端が歩行の補助となるように調整されています。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、読み終わったあとは大切に保管してください。

①杖の先端は歩行の補助となるように調整されています。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、読み終わったあとは大切に保管してください。

②リハビリや体重の中など一部での使用に注意してください。


## ハッピーステッキ(折りたたみ杖高さ調節付) 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、読み終わったあとは大切に保管してください。

### EOP-105


本体材質	アルミニウム合金
持ち手材質	天然木
寸法(全長)	79 ~ 86.5 cm
重量	265 g

※各寸法、重量は参考数値です。

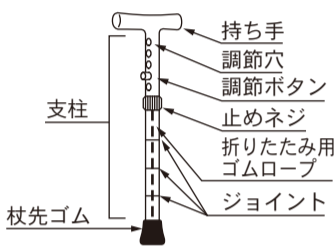


### ●杖長さの目安

- 杖先を足先の前方外側 20cm の場所に置いたとき、肘が 30 ~ 40 度曲がる状態が杖長さを決める際の目安です。

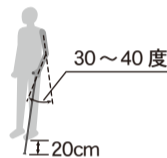

### ●長さの調節方法

- 1 止めネジをゆるめてください。
- 2 調節ボタンを押しながら、適度な長さに調節してください。
- 3 止めネジを確実に締めてください。

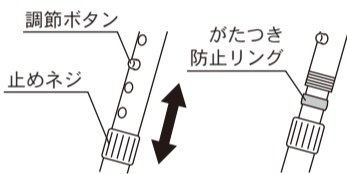


※止めネジの内側には、がたつき防止リングが入っています。長さ調節の際はリングがかならず上右図の位置にあることを確認してください。

**▲注意**

- 調節ボタンと止めネジが確実に固定されていることを、かならず確認してください。
- 指などはさまないように注意してください。


### ●杖の握り方

- 支柱の中心に重心がかかるように握ってください。持ち手の一部分だけを握ると荷重がかたより、不安定になるため大変危険です。

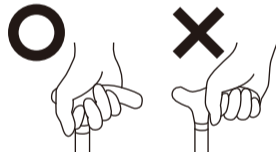

### ●折りたたみ方

- 1 図のように持ち、両方に引っばってください。
- 2 折るように曲げてください。
- 3 そのまま半分に折り、そのほかの部分も同じように折りたたんでください。

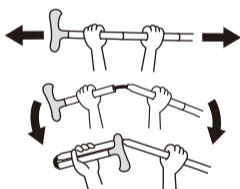

### ▲ご使用上の注意

- ・ 身体に合った杖を選んでください。(「ご使用前に」参照)
- ・ 使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化してはずれやすくなったりした場合は早めに交換してください。
- ・ 使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めネジにゆるみがないことなどを確認してください。
- ・ 折りたたみ用ゴムロープに劣化、ゆるみ、損傷等の異常がある場合はご購入販売店、または弊社お客様相談窓口にご相談ください。
- ・ 濡れたり凍ったりした路面は滑りやすいため、十分に注意してください。
- ・ 床の材質、表面加工などによっては、杖先ゴムが床に付着、色移り、変色する場合がありますため、注意してください。
- ・ この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。
- ・ 杖以外の用途(例えば登山・護身など)には使用しないでください。
- ・ 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合がありますため、十分に注意してください。
- ・ 握り先端に過大な力をかけるような使い方をしないでください。
- ・ 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

### ●ご使用后・保管方法

- ・ ストープの前・夏場の自動車内など、高温になる場所での保管は折りたたみ用ゴムロープが劣化しやすくなるため、避けてください。
- ・ 寒冷地など低温になる場所では、折りたたみ用ゴムロープの弾性が、折りたたんだ状態からすぐには回復しないことがありますので注意してください。
- ・ 使用後は、杖先ゴムの底についた砂などを取り除いてください。
- ・ 濡れたときは乾いた布で拭き取り、湿ったままで放置しないでください。塩素系洗剤、シンナー、クレンジング・アルコール類などは絶対に使用しないでください。
- ・ 屋内で保管してください。また長時間使用しない場合は汚れを落としてから保管してください。
- ・ 長期間保管する場合は、直接床に置かないようにしてください。
- ・ 保管時は、ビニール袋に入れたまま保管せず、光のあたらない湿気の少ない場所で保管してください。
- ・ お子様の手の届かない所に保管してください。

株式会社 幸和製作所

〒590-0982  
大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1  
TEL:072-238-0459

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 MADE IN CHINA