



本体材質	アルミニウム合金
持ち手材質	ポリプロピレン
重量	505g
カラー	-

OD-E02

全長サイズ
96 ～ 119cm

アルミ杖

ご使用前に

杖は、杖なしで歩行できる方でも、杖を補助的に使用する方（体重をかけすぎると、肩や腰に痛み、かえって購入後、手たれ、めくる状態になる場合があります。）など、使用に合わせた歩行方法で歩行してください。

①杖なしでは歩行に足らない方（手れ、めくる状態になる場合があります。）など、使用に合わせた歩行方法で歩行してください。

②リハビリ中など、体の一部を杖で支える方が、体重の一定歩行で歩行できない方。（医師など、指導のもとで使導みません。）

アルミクラッチ杖 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、読み終わったあとは大切に保管してください。


OD-E02

本体材質	アルミニウム合金
持ち手材質	ポリプロピレン
寸法(全長)	96 ～ 119 cm
重量	505 g

※各寸法、重量は参考数値です。


- 肘と手の2カ所で支えるので、1本杖では心配な方でも安心してお使いいただけます。
- 高さは10段階に調節できます。

取替え専用部品 取替えゴム ODE02-GY-P01

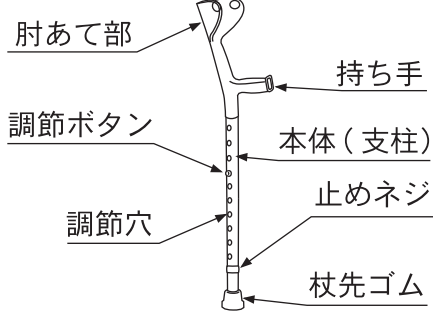


●長さの調節方法

持ち手が腰の位置にくるぐらいが適度な長さの目安です。

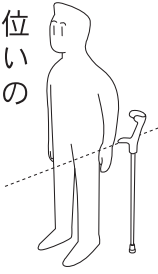

- 1 止めネジを回してゆるめてください。
- 2 調節ボタンを押しながら本体を上下させ、適度な長さに調節してください。
- 3 止めネジを確実に締めてください。

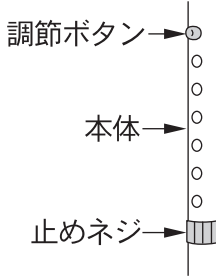


▲注意

- 調節ボタンと止めネジが確実に固定されていることを、かならず確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

▲ご使用上の注意

- ・使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化してはずれやすくなったりした場合は早めに交換してください。
- ・身体に合った高さに調節してから使用してください。肘をかならず肘あて部に当てて、持ち手を握ってください。誤った握り方で使用すると転倒しケガをするおそれがあります。
- ・使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めネジにゆるみがないことなどを確認してください。
- ・濡れたり凍ったりした路面は滑りやすいため、十分に注意してください。
- ・この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。
- ・杖以外の用途（例えば登山・護身など）には使用しないでください。
- ・道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合があるため、十分に注意してください。
- ・分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

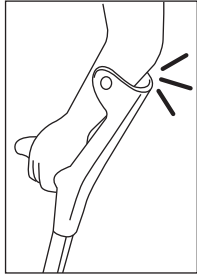

●ご使用後・保管方法

- ・使用後は、杖先ゴムの底についた砂などを取り除いてください。
- ・濡れたときは乾いた布で拭き取り、湿ったままで放置しないでください。塩素系洗剤、シンナー、クレゾールなどは絶対に使用しないでください。
- ・屋内で保管してください。また長時間使用しない場合は汚れを落としてから保管してください。
- ・床の材質、表面加工などによっては、杖先ゴムが床に付着、色移り、変色する場合があります。長時間、保管する場合は、直接床に置かないようにしてください。
- ・保管時は、ビニール袋に入れたまま保管せず、光のあたらない湿気の少ない場所で保管してください。
- ・お子様の手の届かない所に保管してください。

株式会社 幸和製作所 〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1 TEL:072-238-0459

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 MADE IN CHINA