


# 取扱説明書

## 取り付け方法

クリップを杖に強く押し付けて下さい。クリップが開き、杖にはまります。装着後に上下左右の位置を調節して下さい。

※取り付け可能な杖の太さは、直径21~25mmです。

※伸縮杖の場合、長さ調節ボタンに触れないように取り付けして下さい。

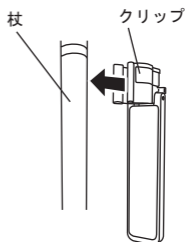


## ストラップの安全機能 (ヒモ有のみ)

ストラップに大きな荷重(6kg以上)が掛かると、根元から抜ける安全設計になっています。電車やバスのドアに杖が挟まれた時などに、引きずられ事故のダメージを最小限にするための機能です。

## <ストラップの修復方法>

- ① クリップ奥の突起から、ゴムチップを抜き取る。
- ② ジョイント金具を突起に取り付ける。
- ③ ゴムチップを、元のよう突起にかぶせる。

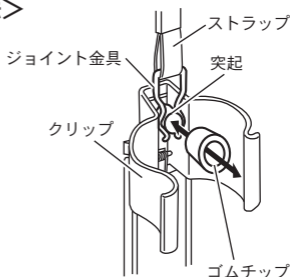

## 使用上の注意

本製品には800 Gaussの磁石が付いておりますので、磁気カードやフロッピーディスクなどの嫌磁性製品にトラブルが生じる恐れがあります。十分注意して使用して下さい。特にペースメーカー装着の方は医療機関に相談の上、使用して下さい。尚、この磁石の影響範囲は10cm以内です。